




Testni lističi CONTOUR®

z encimom glukoza-dehidrogenazo FAD



- **Kapilarni vlek** poskrbi za točno in hitro odmerjanje vzorca krvi.
- **Korekcijska elektroda** izloči vpliv drugih reducentov na rezultat.
- **Rok uporabnosti** po odprtju vsebnika je **12 mesecev** oz. **do izteka roka uporabnosti**.

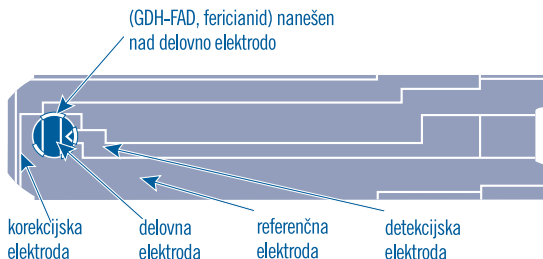

Sistem **Contour**® ustreza priporočilom FDA glede primernosti reagenta **GDH-FAD** (glukoza-dehidrogenaza flavin-adenin-dinukleotid) in metode merjenja (**biosenzorska-amprometrična**).

Hematokrit v območju **od 0 % do 70 %** ne vpliva bistveno na rezultate meritev.
Holesterol v koncentraciji **do 12,9 mmol/L** in **trigliceridi** v koncentraciji **do 34,3 mmol/L** ne vplivajo bistveno na rezultate meritev.

Omejitvene koncentracije nekaterih substanc:

BILIRUBIN:	> 0,34 mmol/L
SEČNA KISLINA:	> 1,90 mmol/L
ASKORBINSKA KISLINA:	> 2,04 mmol/L
PARACETAMOL:	> 1,46 mmol/L
MALTOZA:	ni vpliva
GALAKTOZA:	ni vpliva



VPLIVI NA REZULTATE MERITEV

Druge substance, ki so bile preverjene z merilniki Bayer:

SUBSTANCA	ZGORNJA MEJA TERAPEVTSKIH KONCENTRACIJ	ODSTOPANJA PRI ZGORNJI MEJI TERAPEVTSKIH KONCENTRACIJ	OMEJITVENA KONCENTRACIJA
Akarboza	6 mg/dL	Nepomembna	Nepomembna
Albumin	5,4 g/dL	Nepomembna	Nepomembna
Beta-hidroksi butanojska kislina	< 1 mg/dL	Nepomembna	Nepomembna
Dobutamin	0,07 mg/dL	+0,1 %	16 mg/dL
Dopamin	0,04 mg/dL	+0,1 %	4,5 mg/dL
Etanol	≤ 50 mg/dL	Nepomembna	Nepomembna
Fruktoza	7 mg/dL	Nepomembna	Nepomembna
Gentiska kislina	5 mg/dL	+11,4 %	15 mg/dL
Gliburid	0,4 mg/dL	Nepomembna	Nepomembna
Glipizid	0,8 mg/dL	-1,4 %	8,4 mg/dL
Glukozamin	30 mg/dL	Nepomembna	Nepomembna
Heparin	4000 enot/dL	Nepomembna	Nepomembna
Ibuprofen	4,2 mg/dL	Nepomembna	Nepomembna
Kofein	1,5 mg/dL	Nepomembna	Nepomembna
Kreatinin	1,5 mg/dL	Nepomembna	Nepomembna
Ksiloza	57 mg/dL (2-urni absorpcijski test)	Uporaba kontraindicirana	8,7 mg/dL
L-Dopa	0,3 mg/dL	+2,4 %	1,9 mg/dL
Metformin	0,4 mg/dL	Nepomembna	Nepomembna
Metildopa	0,75 mg/dL	+3,1 %	3,6 mg/dL
Naproksen	12 mg/dL	+0,9 %	208 mg/dL
Natrijev laktat	20 mg/gL	Nepomembna	Nepomembna
Natrijev salicilat	30 mg/dL	Nepomembna	Nepomembna
Saharoza	2,7 mg/dL	Nepomembna	Nepomembna
Tetraciklin	0,4 mg/dL	Nepomembna	Nepomembna

Bayerjev testni listič **Contour**[®] skupaj z merilnikom **Contour**[®] omogoča varno, natančno in najsodobnejšo samokontrolo sladkorne bolezni.



Zaloker & Zaloker d.o.o.

Kajuhova ulica 9

1000 Ljubljana

ZALOKER & ZALOKER

Tel: 01 542 51 11



www.zaloker-zaloker.si

