



Merilnik glukoze v krvi CONTOUR®

Oseбно prilagodljiva samokontrola sladkorne bolezni



- **Osnovno delovanje:** Brez kodiranja™, hitro, majhen vzorec krvi
- **Nivo 1:** hitro in enostavno do rezultata
- **Nivo 2:** napredno samovodenje za izkušenega uporabnika



Merilnik **Contour**® se prilagaja potrebam in zahtevam posameznika. Uporabnika spremlja od prvih korakov po postavitvi diagnoze do samostojnega in izkušenega vodenja sladkorne bolezni.

Contour® omogoča izbiro, korak za korakom ...



OSNOVNO DELOVANJE – ENOSTAVNO IN HITRO

Merilnik **Contour**[®] je optimalno prilagodljiv (potrebam posameznega uporabnika) in “raste” skupaj s potrebami in zahtevami.



Osnovno delovanje merilnika je **enostavno**:

“Vstavite testni listič in merilnik se samodejno vključi.”

hitro:

“Rezultat meritve v 5 sekundah.”

in uporabniku prijazno:

“Majhen vzorec krvi - 0,6 μ L.”

“Velik zaslon z jasnimi zapisi.”



NIVO 1 – HITRA IN ENOSTAVNA POVRATNA INFORMACIJA

Kaj lahko o izmerjenih vrednostih “pove” merilnik?

Merilnik **Contour**[®] omogoča hitro dostopno povratno informacijo o uspešnosti vodenja sladkorne bolezni.



- **Povprečje za zadnjih 14 dni.**
(2x pritisnite gumb **M**)

d = število dni

n = število meritev

A = izračun povprečja v mmol/L



- **Seštevek visokih (HI) in nizkih (LO) vrednosti za zadnjih 7 dni.**

(pritisnite puščico gor ▲)

HI = število meritev nad mejo za HI
(10 mmol/L)

LO = število meritev pod mejo za LO
(4 mmol/L)

n = število opravljenih meritev

7d = zadnjih 7 dni



- **Zadnjih 480 meritev v spominu.**
(s pritiskom na puščico dol ▼ se pomikate od najnovejšega proti starejšim rezultatom meritev)



Kaj nudi napredni način delovanja?

Optimizacija vodenja sladkorne bolezni za izkušene uporabnike.

(Dolg pritisk na gumb M)



Sladkorna bolezen vsakega posameznika je drugačna. Prav tako različni so načini življenja z njo. Razvoj nove tehnologije gre čedalje bolj v smeri prilagajanja osebnim potrebam vsakega posameznika.

- **Označevalniki meritev** pred in po obroku ter opomba za vpis.

Simbol za meritev pred obrokom



Simbol za meritev po obroku



Simbol za opombo v dnevniku



Kako lahko izkoristite prednosti dodatnih funkcij merilnika?

(Vstop v nastavitve: *dolg pritisk na gumb M*)

Merilnik **Contour**[®] omogoča vklop dodatnih funkcij nivoja 2.



Pregledovanje posameznih meritev je včasih zamudno, zato ima merilnik **Contour**[®] možnost nastavitve meje za visoke in nizke vrednosti. **Vpogled v seštevke visokih oz. nizkih vrednosti** meritev nudi hitro oceno glikemije v preteklem tednu.

- **Nastavljive visoke (HI) in nizke (LO) mejne vrednosti**

Osebna izbira za LO: 3,3–5,0 mmol/L in HI: 5,6–13,9 mmol/L



Postprandialna vrednost glukoze je v neposredni povezavi s tveganjem za razvoj zapletov sladkorne bolezni. Dober nadzor postprandialne glukoze ima pozitivne učinke na urejenost sladkorne bolezni, zato je merjenje glukoze po obroku pomemben del dobrega vodenja sladkorne bolezni.

- **Nastavljiv alarm po obroku**

Osebna izbira časa: 1,0–2,5 h



Kaj nudijo izračuni povprečij?

Merilnik **Contour**[®] izračunava povprečja meritev za 3 različna časovna obdobja.

Izračuni povprečij pomenijo hitro in grobo oceno gibanja glikemije v izbranem časovnem obdobju. Daljše obdobje in več meritev pomeni točnejšo oceno in bolje prepoznaven trend.



- **Povprečje za zadnjih 14 dni**
(2x pritisnite gumb **M**,
1x pritisnite puščico ▲)



- **Povprečje za zadnjih 7 dni**
(1x pritisnite puščico ▲)



- **Povprečje za zadnjih 30 dni**
(1x pritisnite puščico gor ▲)



d = število dni

n = število opravljenih meritev

A = izračun povprečja v mmol/L






CELOSTEN VPOGLED – GLUCOFACETS™ EXPRESS

Veliko število različnih podatkov?

Zamudno iskanje po spominu merilnika?

Pregledni prikazi računalniškega programa **Glucofacts™ Express** omogočajo uporabniku prijazen vpogled v vse podatke iz spomina merilnika ... v enem samem koraku.

- Osebn prilagodljive nastavitve prikazov
- Pregled poročil
- Tiskanje ali prikaz

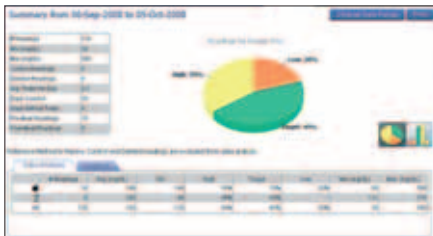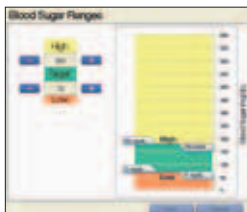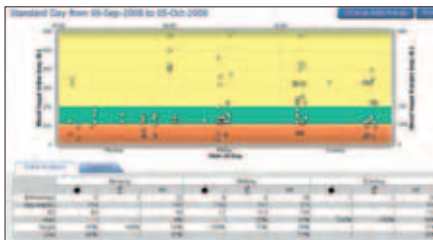

www.bayerglucofacts.com



simplewins™

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE SISTEMA CONTOUR®

Pakiranje	<ul style="list-style-type: none">- Merilnik Contour- 10 testnih lističev Contour- Sprožilna naprava Microlet2- 10 lancet Microlet- Torbica in navodila za uporabo
Testni lističi	Contour
Rok uporabnosti testnih lističev	12 mesecev po odprtju vsebnika oz. do izteka roka uporabnosti
Pakiranje testnih lističev	50 kosov v plastičnem vsebniku
Območje merjenja	0,6 do 33,3 mmol/L
Umerjenost merilnika	Plazma/serum
Vzorec in velikost	0,6 µL kapilarne krvi
Čas merjenja	5 sekund
Metoda merjenja	Biosenzorska-amperometrična
Reagent (encim)	GDH-FAD (glukoza-dehidrogenaza flavin-adenin-dinukleotid)
Obseg hematokrita	0–70 %
Delovna temperatura merilnika	5–45 °C
Relativna vlažnost okolja	10–93 %
Merjenje z odvzemom krvi iz alternativnih mest na telesu	Da
Spomin merilnika	480 meritev
Prenos podatkov v računalnik	Da. Program Glucofacts™ Express in USB kabel.



ZALOKER & ZALOKER



Zaloker & Zaloker d.o.o.

Kajuhovalica 9

1000 Ljubljana

Tel: 01 542 51 11

www.zaloker-zaloker.si

