

## Varno odstranjevanje lancete

Lanceto MICROLET® lahko iz sprožilne naprave MICROLET\*2 odstranite brez dotikanja.

Snemite pokrovček sprožilne naprave in lanceto zabodite v zaščitno kapico lancete.



## Izmet lancete v dveh korakih

Pritisnite modri gumb (a) in ga držite pritisnjene.

Izlecite napenjalni mehanizem (b).

Lanceta samodejno izpade iz sprožilne naprave v posodo za infektivne odpadke.



## Sprožilna naprava MICROLET®2

### Odvzem kapilarne krvi pri samokontroli sladkorne bolezni

**MICROLET\*2 zmanjša bolečino na najmanjšo možno mero z:**

- možnostjo izbire **5 različnih globin** vboda,
- **silikoniziranimi** lancetami in
- mehanizmom za **preprečevanje povratnega udara** lancete.



Sprožilna naprava MICROLET\*2 s **samodejnim izmetom lancete** je priložena vsem merilnikom glukoze v krvi CONTOUR® in BREEZE\*2.


**7 barvnih lancet za 7 dni v tednu!**

## Silikonska prevleka lancete

Silikonska prevleka iglice lancete MICROLET® naredi iglico bolj gladko, **zmanjšuje trenje** in s tem olajša vbod.

Silikon je **varen za uporabo** in **ne vpliva na rezultate** meritev z merilniki Bayer.

**Redna menjava lancete** zagotavlja maksimalno varnost in udobje. Ko je lanceta enkrat uporabljena, ni več sterilna in z vsakim nadaljnjim vbodom postaja bolj topa.

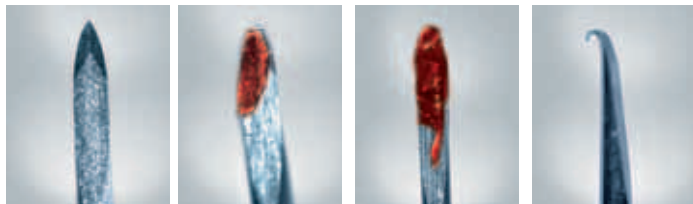

Konica nove lancete

4 x uporabljena lanceta

6 x uporabljena lanceta

8 x uporabljena in očiščena lanceta

## Različne globine vboda

**Sivi pokrovček** naprave MICROLET®2 je namenjen pridobivanju vzorca krvi iz prstnih konic. Omogoča nastavitve **5 globin vboda**.

Najplitkejši vbod

Plitek vbod

Najgloblji vbod



## Odvzem iz alternativnega mesta

Sprožilna naprava MICROLET®2 omogoča uporabo dodatnega prozornega pokrovčka za odvzem krvi iz drugih delov telesa.



Za brezplačen pokrovček pokličite 080 1880.

## Primer odvzema iz podlakti:

- Mesto odvzema močno podrgnite, da postane toplo.
- Vstavite lanceto MICROLET®2 in namestite prozorni pokrovček. Napravo nastavite na mesto vboda in pritisnite sprožilni gumb.
- Naprave ne odmakajte od kože, ampak nekajkrat (2-3 krat) pritisnite in popustite pritisk, ne da bi prekinili stik s kožo.
- Ko se oblikuje primerno velika kapljica krvi, napravo odmaknite od kože in ob tem pazite, da kapljice ne razlijete.

