


Microlet® next

Sprožilna naprava

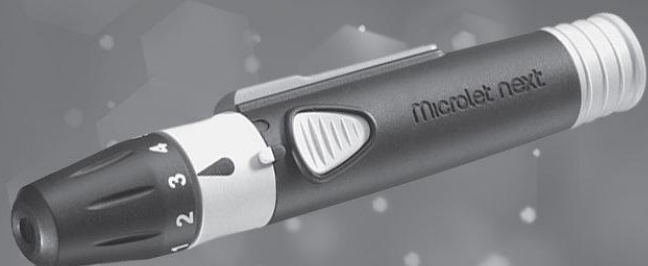

NAVODILA ZA UPORABO

- Izmetnik lancete za varno odstranjevanje lancete.
- **Črno-beli** nastavljivi pokrovček za merjenje zgolj z odvzemom iz prstne blazinice.
- **Prozorni** pokrovček za alternativni odvzem za merjenje zgolj z odvzemom iz alternativnega mesta.
- Sprožilna naprava MICROLET®NEXT in lancete MICROLET® se uporabljajo za odvzem kapilarne krvi iz prstne blazinice ali dlani, za merjenje glukoze v krvi.

Za merjenje z odvzemom iz prstne blazinice
in merjenje z odvzemom iz dlani

⚠ OPOZORILO

- Posvetujte se z zdravstvenim delavcem, ali je alternativno mesto odvzema za vas primerno.
- Naprave za neprekinjeno merjenje glukoze ne umerjajte z vrednostjo glukoze iz alternativnega odvzema.
- Insulina ne odmerjajte na osnovi vrednosti glukoze iz alternativnega odvzema.


Alternativnega odvzema ne uporabite v teh primerih:

- če menite, da je vrednost glukoze v krvi nizka (hipoglikemija);
- če se vrednost glukoze v krvi hitro spreminja (po obroku, odmerku insulina ali telesni aktivnosti);
- če ne občutite simptomov nizke ravni glukoze v krvi (nezavedanje hipoglikemije);
- če se vrednosti meritev glukoze v krvi iz alternativnega mesta ne ujemajo z vašim počutjem;
- med boleznijo ali ob stresu;
- pred vožnjo z avtomobilom ali upravljanjem s strojem.

Priprava sprožilne naprave

Opozorilo: Hranite izven dosega otrok. Komplet vsebuje majhne dele, ki lahko, če jih pomotoma pogoltnete, povzročijo zadušitev.

1. Roke in mesto vboda umijte z milom in toplo vodo. Sperite jih in jih dobro posušite.

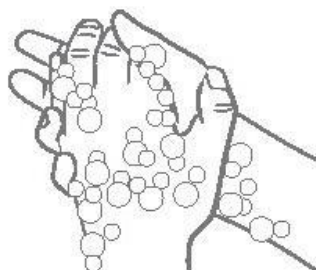

2. Odklenite pokrovček. Zavrtite beli obroč tako, da bosta bela izbočena oznaka in črna udrta oznaka poravnani, kot je prikazano.



3. Snemite pokrovček.

Pomoč uporabnikom

Garancija: Sprožilna naprava ima garancijo 5 let.

Če potrebujete pomoč ali imate vprašanja o merjenju glukoze v krvi, prosimo pokličite pomoč uporabnikom na 080 1880.

Sprožilna naprava MICROLET®NEXT:

LANCING DEVICE = Sprožilna naprava

AST = Alternativno mesto odvzema (AST)

Lancete MICROLET®:


LANCETS = Lancete

 = Samo za enkratno uporabo


STERILE R = Sterilizirano z obsevanjem

Sprožilna naprava MICROLET NEXT je izdelana na Poljskem.

1. **Očistite sprožilno napravo** z izopropilnim alkoholom tako, da odstranite vso umazanijo.
2. Po potrebi jo osušite s čisto papirnato brisačo.

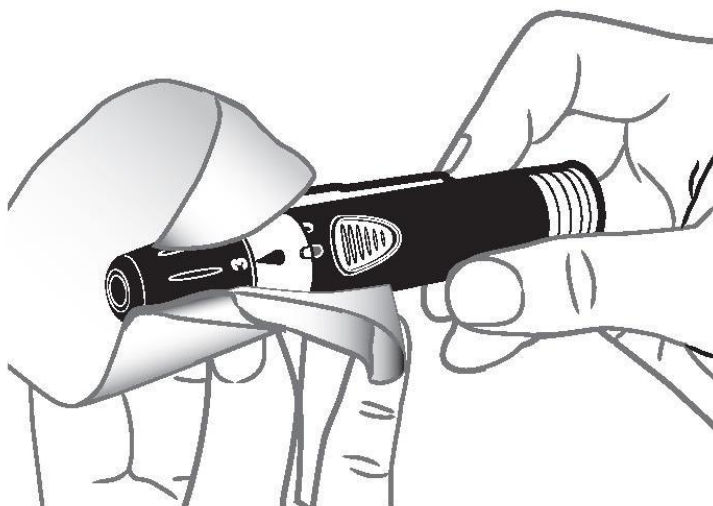


4. Zrahljajte okroglo zaščitno kapico na lanceti tako, da jo zavrtite za $\frac{1}{4}$ obrata, **vendar je ne odstranite.**

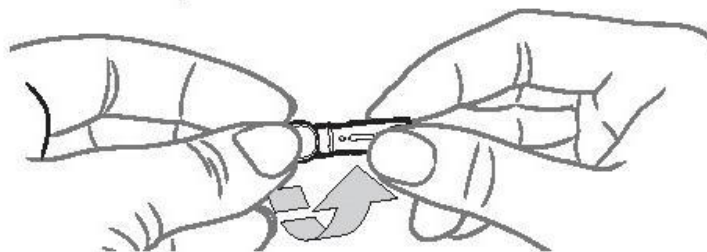


5. Čvrsto vstavite lanceto v sprožilno napravo. **Potiskajte** lanceto, dokler se popolnoma ne ustavi.




6. Previdno odvijte okroglo zaščitno kapico lancete. Shranite jo za pozneje, da boste zaščitili iglico lancete, preden jo boste odvrgli.

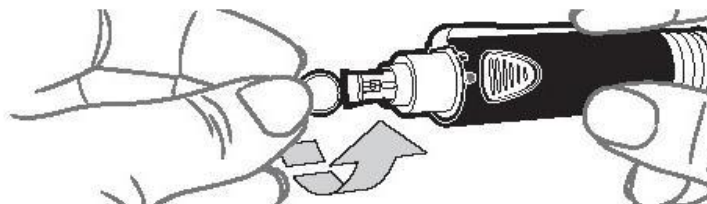

6. Masirajte dlan v smeri prsta in mesta vboda, da priteče kapljica krvi. Nikoli ne stiskajte mesta tik ob vbodu.

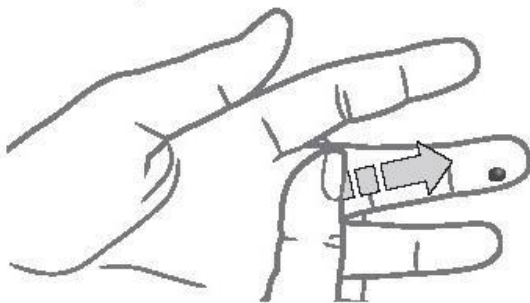


7. Meritev glukoze izvedite takoj, ko se oblikuje majhna, okrogla kapljica krvi, kot je prikazano.

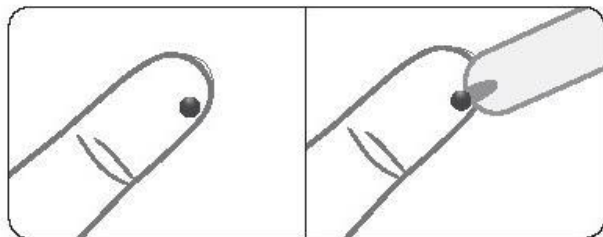


8. Obrišite mesto vboda s čistim, suhim robčkom in **pritiskajte** na mesto vboda, dokler se krvavitev ne ustavi.

4. Del za napenjanje povlecite nazaj, da pripravite sprožilno napravo. Gumb za sprožitev je izbočen, ko je sprožilna naprava pripravljena.
5. Sprožilno napravo pritisnite na mesto vboda, nato pritisnite gumb za sprožitev. **OB TEM ZASLIŠITE KLIK.**

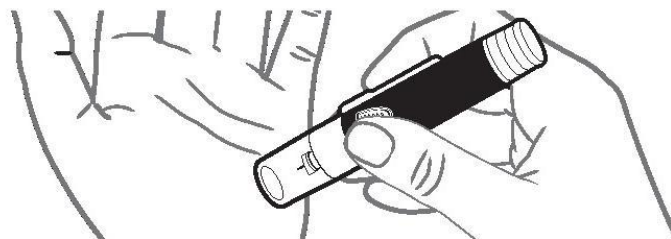

(Če ni bilo vboda, napravo ponovno napnite, tako da ponovite 4. korak.)

6. Naprave ne odmaknite od dlani. Napravo z enakomernim pritiskom držite na mestu vboda, dokler se pod prozornim pokrovčkom ne oblikuje majhna, okrogla kapljica krvi.

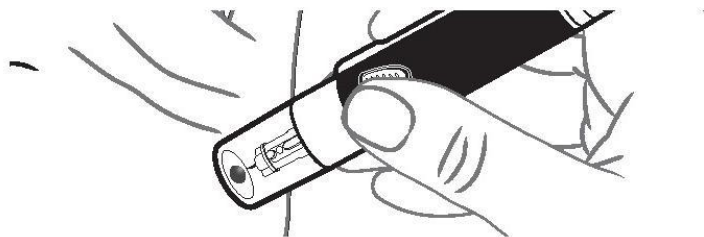

Pridobivanje kapljice krvi – dlan

MERJENJE Z ODVZEMOM IZ ALTERNATIVNEGA MESTA (AST) – DLAN

Uporabite **prozorni** pokrovček za alternativni odvzem.

1. Vstavite lanceto, kot je opisano v razdelku *Priprava sprožilne naprave*.
2. Namestite in zaklenite **prozorni** pokrovček za alternativni odvzem. Vrtite beli obroč, dokler ne klikne in se bela in črna izbočena oznaka poravnata, kot je prikazano.



OPOZORILO: Prozornega pokrovčka za alternativni odvzem ne smete uporabiti na blazinicah prstov.

3. Za mesto vboda izberite mesen predel dlani. Izogibajte se venam, materinim znamenjem, kostem in kitam.




Izmet/odstranjevanje lancete

Uporabljeno lanceto vedno odstranite kot medicinski odpadke, da bi preprečili poškodbo ali okužbo drugih. Ob vsaki meritvi glukoze v krvi uporabite novo. **Lancet ne uporabljajte ponovno.**

Sprožilna naprava MICROLET NEXT ima izmet lancete. Lancete ne vlecite iz sprožilne naprave z roko.




1. Previdno odstranite pokrovček s sprožilne naprave. Zavrtite beli obroč pokrovčka tako, da poravnate belo izbočeno oznako s črno udrto oznako. Snemite pokrovček.

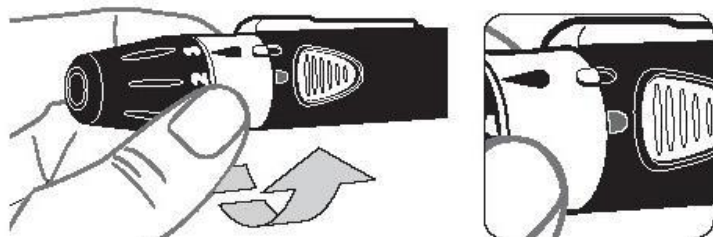

„Klik“ za sprostitev

2. Okroglo zaščitno kapico, ki ste jo shranili, položite na ravno površino. Uporabljeno lanceto, ko je ta še v sprožilni napravi, potisnite v sredino pokrovčka.

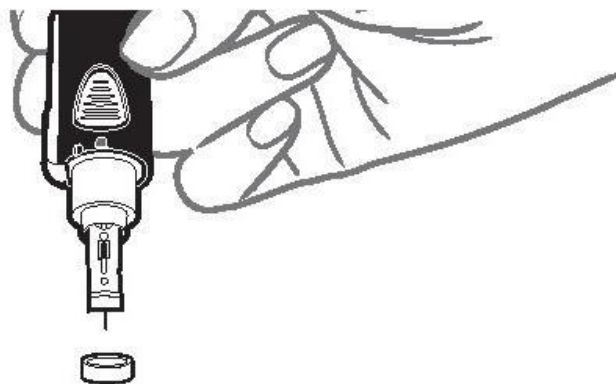


Se nadaljuje na nasprotni strani

3. Sprožilno napravo usmerite proti vsebniku za ostre predmete ali za to primerni posodi (uporabite lahko prazno plastenko s pokrovčkom). Vsebnik ali posodo ustrezno označite in shranite izven dosega otrok.
4. Sivi izmetnik lancete potiskajte naprej, dokler lanceta ne pade v vsebnik, nato izmetnik pomaknite nazaj.



5. Pokrovček namestite nazaj in ga **zaklenite**. Za zaklep zavrtite beli obroč.

7. Napravo dvignite naravnost navzgor in jo odmaknite od kože. Pri tem pazite, da kapljice ne razmažete.
8. Takoj izmerite glukozo v krvi.

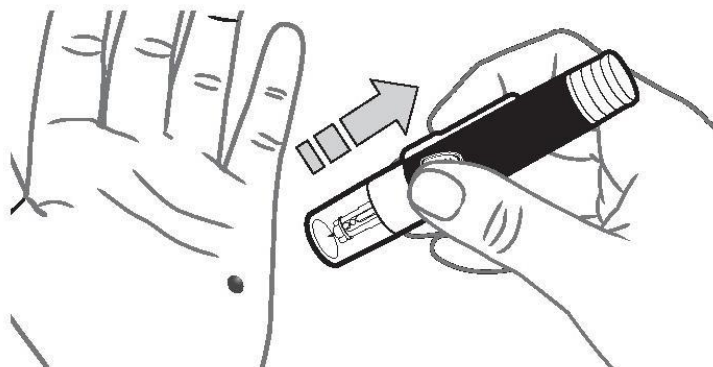


Meritve ne izvedite, če je kri:

- razmazana
- redka
- strjena
- razredčena z medcelično tekočino

9. Obrišite mesto vboda s čistim, suhim robčkom in pritiskajte na mesto vboda, dokler se krvavitev ne ustavi.


Glejte: ***Izmet/odstranjevanje lancete***

4. Izvlecite del za napenjanje, da napnete sprožilno napravo. Ko je sprožilna naprava napeta, je gumb za sprožitev izbočen.

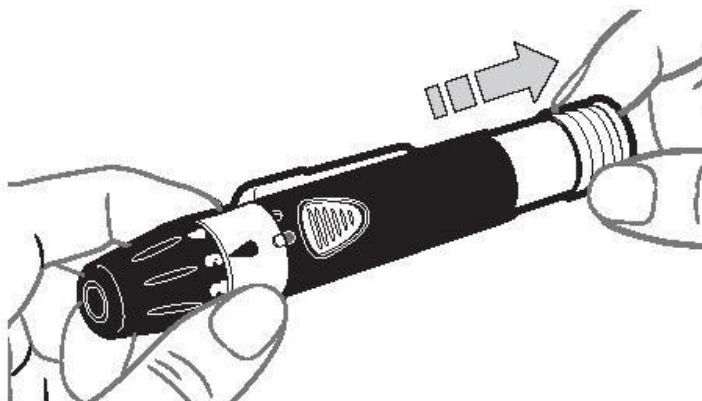

5. Sprožilno napravo pritisnite na **stranski del** blazinice prsta in pritisnite gumb za sprožitev. OB TEM ZASLIŠITE KLIK.

„Klik“

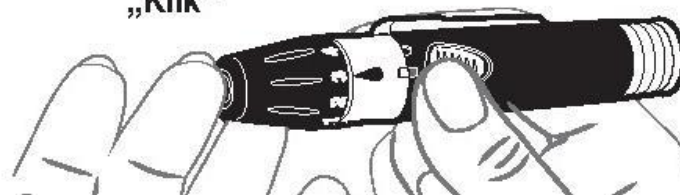


(Če ni bilo vboda, napravo ponovno napnite, tako da ponovite 4. korak.)

Pridobivanje kapljice krvi – prstna blazinica

MERJENJE Z ODVZEMOM IZ PRSTNE BLAZINICE

Uporabite **črno-beli** nastavljljivi pokrovček.
Ne uporabite prozornega pokrovčka za alternativni odvzem.

1. Namestite **črno-beli** nastavljljivi pokrovček.
2. Zaklenite pokrovček. Vrtite beli obroč, dokler ne klikne in se bela in črna izbočena oznaka poravnata, kot je prikazano.

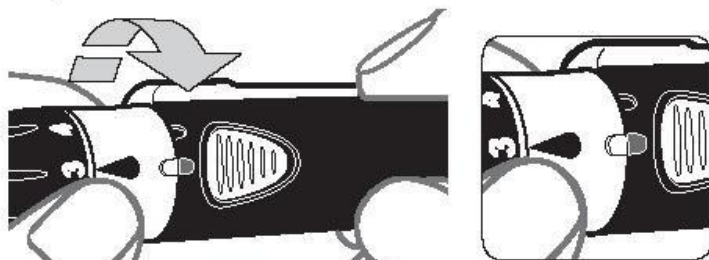

„Klik“ za zaklep

3. Zavrtite vrtljivi del pokrovčka, da prilagodite globino vboda. Globina vboda je odvisna tudi od pritiska na mesto vboda.



Najplitvejši
vbod



Najgloblji
vbod

Čiščenje

Sprožilno napravo očistite enkrat tedensko. Uporabite krpo, navlaženo s 70-odstotnim izopropilnim alkoholom (ki ga dobite v lekarni). Ne uporabite belila (natrijevega hipoklorita).

Potrošni material, potreben za čiščenje:

- Krpa, navlažena s 70-odstotnim izopropilnim alkoholom (ki ga dobite v lekarni).
Ne uporabite belila (natrijevega hipoklorita)
- papirnate brisače

Ascensia, logotip Ascensia Diabetes Care in Microlet so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne družbe Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Vse druge blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov in se uporabljajo samo za informativne namene. Nobeno razmerje ali odobritev ne smeta biti privzeta ali implicirana.

Bayer in Bayerjev križ sta registrirani blagovni znamki družbe Bayer.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Vse pravice pridržane.



* Ni priložen vsem kompletom.

Na voljo na oddelku za **pomoč uporabnikom**.

MOŽNO BIOLOŠKO TVEGANJE

- Sprožilna naprava MICROLET NEXT je namenjena osebni uporabi, za pridobivanje vzorca krvi pri samokontroli glukoze. Sprožilne naprave zaradi nevarnosti okužbe ne sme uporabljati več oseb.
- Lancet ne uporabljajte ponovno. Uporabljene lancete niso sterilne. Ob vsaki meritvi glukoze v krvi uporabite novo.
- Uporabljene testne lističe in lancete vedno odstranite kot medicinski odpadki oziroma po navodilih zdravstvenega delavca.
- Pred merjenjem in po njem umijte roke z milom in vodo ter jih dobro posušite. Tako ravnajte vedno, kadar rokujete z merilnikom, sprožilno napravo ali testnimi lističi.

Zaloker & Zaloker d.o.o.
Kajuhova ulica 9
1000 Ljubljana
Slovenija
Brezplačni tel.: 080 1880



Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland



ASCENSIA
Diabetes Care

Za informacije o patentih in
povezanih licencah glejte
www.patents.ascensia.com

