



# Postopek uporabe za strokovno osebje

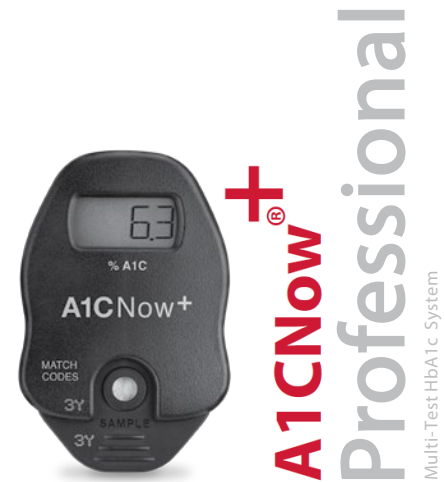

**Opomba:** Vsi prikazi škatle in vrečk v teh navodilih so IZKLJUČNO v ilustrativne namene. Prosimo, ogledjte si vsebino vašega pakiranja.

## Uvod


- Če je bila nalepka, ki je nameščena na zunanji strani vsake škatle, izpostavljena temperaturi, višji od 50°C (122°F), se pika na nalepki obarva rdeče in izdelka ne smete uporabiti.
- Vsi deli sistema morajo biti ob uporabi prilagojeni na isto temperaturo, znotraj določenega območja.
- Če je bil komplet nedavno izpostavljen visoki temperaturi (nad 28 °C/82 °F), ali če je bil v hladilniku, ga pred uporabo imejte na sobni temperaturi vsaj eno uro.
- Izogibajte se izvajanju testa na neposredni sončni svetlobi, na vročih ali hladnih površinah, ali v bližini virov toplote ali mraza.
- Za potrditev pravilnega delovanja sistema uporabite kakovostne kontrolne materiale. Informacije o tem, kdaj morate izvajati kontrolne teste, najdete v navodilih za uporabo.

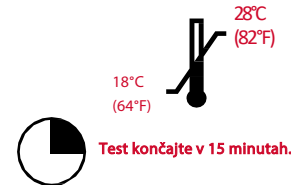

Test končajte v 15 minutah.


## Preverite ujemanje serijskih števil

Analizator uporabljajte le z materiali iz pripadajoče originalne škatle. Življenjska doba analizatorja poteče, ko izvedete programirano število testov. Če vstavite drugo testno kartušo, analizator prikaže "00 TL".

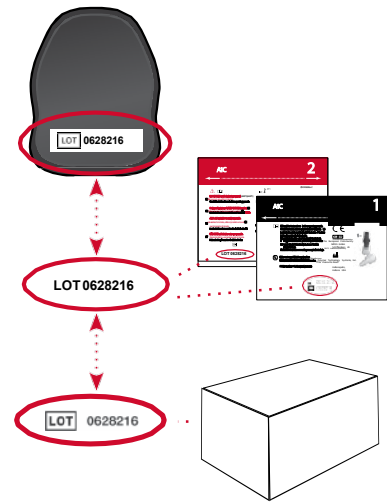

## 1 Odprite plastično vrečko z vzorčevalnikom\*

Pretrgajte plastično vrečko po perforirani liniji.

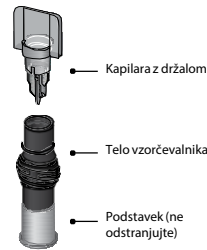

## 2 Odvzem vzorca krvi

### Odvzem iz prsta

- Za odvzem krvi uporabite lanceto.



ALI

ALI


### Odvzem venske krvi

- Pred merjenjem kri dobro premešajte.





- Odvzemite vzorec krvi iz površine.

## 3 Preverjanje količine vzorca krvi

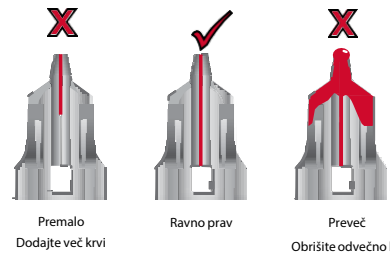


## 4 Vstavljanje kapilare z držalom

Kapilaro z držalom popolnoma vstavite v telo vzorčevalnika. Pomagajte si s sukanjem.

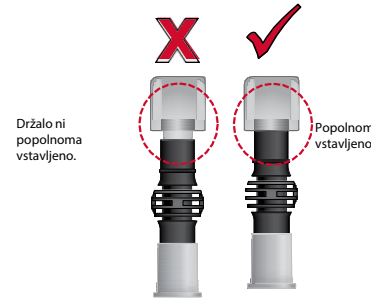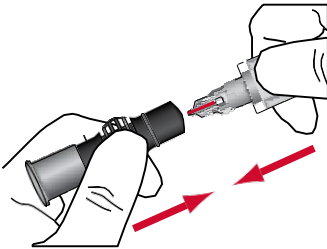

## 5 Pretresite


- Dobro pretresite 6- do 8-krat. Tako se bo kri pravilno premešala z raztopino.
- Med pripravo testne kartuše položite vzorčevalnik na mizo.

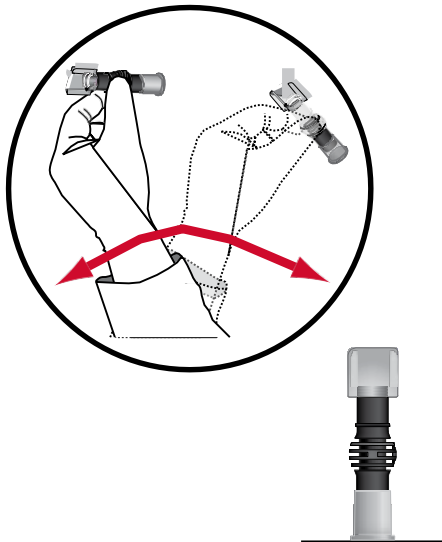

## 6 Odprite vrečko s testno kartušo\*

Pretrgajte folijo vrečke po stranskih zarezah.

**Pozor:** NE odpirajte vrečke do tega koraka. Uporabite v 2 minutah po odpiranju. Ne uporabite, če je folija poškodovana.

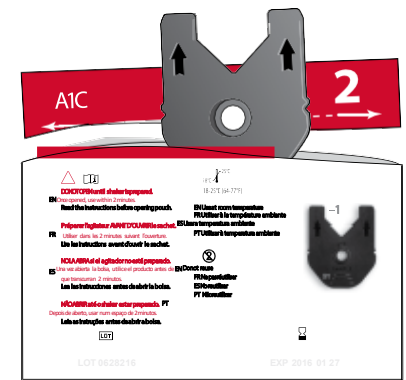


## 7 Vstavite testno kartušo

- S "klikom" potisnite testno kartušo na mesto.
- Kod analizatorja in testne kartuše se morata ujemati.
- Če se kodi ne ujemata, pokličite pomoč uporabnikom na +1-317-870-5610 ali lokalnega distributerja.



## 8 Pripravite vzorčevalnik

Odstranite podstavek vzorčevalnika.

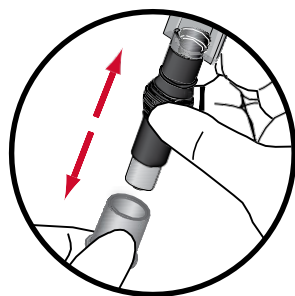


## 9 Vzorec prenesite v kartušo

- Zagotovite, da je analizator na ravni površini.
- Vzorčevalnik potisnite popolnoma navzdol, da sprostite razredčen vzorec. Hitro odstranite.



**Analizatorja se ne dotikajte, dokler test ni končan.**

## 10 Rezultat v 5 minutah

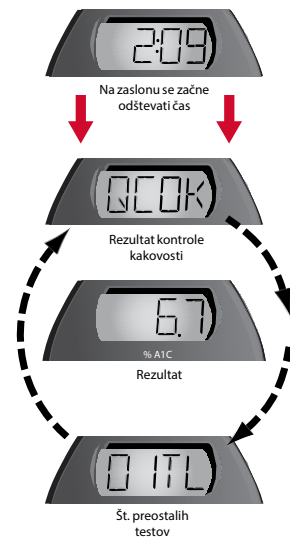

- Rezultat ostane prikazan na zaslonu analizatorja 15 minut ali dokler ne vstavite nove testne kartuše.
- Če se na zaslonu ne prikaže zapis "QCOK", pokličite pomoč uporabnikom ali glejte poglavje Odpravljanje napak.

## 11 Odstranjevanje kartuše / Hranjenje analizatorja

- Odstranite skladno z vašimi postopki ravnanja z nevarnimi biološkimi odpadki.
- Analizator shranite za nadaljnje teste. Analizator na zaslonu prikaže, na primer "01TL", če je preostal še en test in "00TL", če ste uporabili zadnjo testno kartušo.
- Analizator 15 minut prikazuje rezultat, potem se samodejno izklopi.



**OPOMBA:** Če želite opraviti nov test, uporabite nov vzorčevalnik in novo testno kartušo iz istega kompleta ter se vrnite na 1. korak.

