

# Kratki napotki za ustvarjanje poročil v spletni programski opremi CareLink System (carelink.medtronic.eu)

Spletna programska oprema **CareLink System** omogoča prenos podatkov iz inzulinske črpalke in sistema za neprekinjeno merjenje glukoze ter (s soglasjem uporabnika) povezavo do spletne programske opreme za uporabnika **CareLink Personal**.

## Ustvarjanje poročil

- Po vnosu gesla in uporabniškega imena dodajte novega bolnika (+ **Nov bolnik**) ali uporabnika izberite iz seznama.
- S klikom na **↑ Prenesi iz naprave**, začnete postopek odčitavanja podatkov (sledite napotkom na zaslону).
- Po zaključku prenosa kliknite gumb **Osveži**.
- Spodaj prikazana **POROČILA S POVZETKI** prikazujejo posamezna poročila. S kliki izberete poročila za prikaz.
  - Privzeto obdobje poročanja je **zadnjih 14 dni**. Obdobje lahko spremenite v **Izberite najnovije podatke/Izberite razpon po meri**.
  - Izbiri poročil lahko prednastavite v zavihku **Izberi priljubljene**.V zavihku **DNEVNA POROČILA** lahko izberete dneve, ki si jih želite podrobneje ogledati.
- Ocena in napredek**: Če izberete poročilo **Ocena in napredek** (ni na voljo za Paradigm Veo) se zgoraj desno, v vrstici **Obdobje poročanja**, prikaže možnost izbire obdobja za primerjavo, **Napredek od**.
  - Privzeto obdobje primerjave je **izpred 3 mesecev**, lahko pa ga spremenite (od 14 dni do 12 mes.).
- Kliknite **Ustvarjanje poročil** v desnem kotu.
- Poročilo se prikaže v novem zavihku, od koder ga lahko natisnete ali shranite. Uporabite desni klik miške.

The screenshot displays the CareLink System web interface. At the top, the user is logged in as 'MP 646' (Starost: 75, DATUM ROJSTVA: 07/06/1944) and is connected to a 'Zaloker Zaloker' device. The main navigation bar includes 'POROČILA', 'NASTAVITVE POROČIL', and 'PROFIL BOLNIKA'. The 'POROČILA' section is active, showing a timeline from December 11, 2019, to January 10, 2020. The selected report period is '14 dni' (14 days), and the comparison period is 'pred št. mesecev: 3' (3 months ago). The interface shows a list of reports under 'POROČILA S POVZETKI (9)'. The reports are: 'Ocena in napredek', 'Tedenski pregled', 'Nadzorna plošča', 'Bolus ob obroku z Bolus Wizard', 'Epizodno poročilo', 'Navade', 'Pregled senzorja in merilnika', 'Dnevnik', and 'Nastavitve naprave'. The 'Ustvarjanje poročil' button is visible in the top right corner of the report list.

Več informacij: **051 316 560** Tehnična pomoč za CareLink System: **051 366 629** (delavnik od 7.00 do 15.00)