

Microlet[®] next sprožilna naprava



Nova sprožilna naprava

- Enostavna uporaba
- Blag vbod
- 5 nastavitev globine
- Izmet lancete
- 5 let garancije

MICROLET®NEXT

Kratka navodila



Umijte roke s toplo vodo in milom ter jih osušite.



Odstranite pokrovček z naprave.



Kapico lancete zavrtite za $\frac{1}{4}$ obrata in lanceto vstavite v napravo.



Odstranite kapico lancete in jo shranite za kasnejšo uporabo.



Pokrovček namestite nazaj in z vrtenjem izberite globino vboda.



Napravo prislonite na mesto vboda in pritisnite sprožilni gumb.



Odstranite pokrovček, lanceto zapičite v kapico in jo z izmetnikom izvrzite iz naprave.

* Kratka navodila ne nadomeščajo navodil za uporabo, ki so priložena napravi.

Zaloker & Zaloker d.o.o.
Kajuhova ulica 9
1000 Ljubljana
www.zaloker-zaloker.si
www.contournextone.si



Video navodila za uporabo:
zaloker-zaloker.si