
KRATKA NAVODILA ZA PRENOS PODATKOV V PROGRAMSKO OPREMO CARELINK - V.14.0b

Programska oprema **CareLink Personal** je brezplačna spletna aplikacija v slovenskem jeziku. Omogoča prenos podatkov iz inzulinske črpalke in sistema za neprekinjeno merjenje glukoze na vaš računalnik. Poročilo nato lahko delite z vašim zdravnikom. Napotki, prikazani na zaslonih, se lahko prikazujejo v različnih jezikih, odvisno od nastavitev vašega računalnika.

Dostop in ustvarjanje računa

Za prenos podatkov potrebujete merilnik, ki je obenem tudi vmesnik za prenos podatkov, inzulinsko črpalko in računalnik z dostopom do spleta.

- Merilnik glukoze v krvi **Contour Next Link** za prenos iz črpalke **Paradigm VEO**.
- Merilnik glukoze v krvi **Contour Next Link 2.4** za prenos iz črpalke **MiniMed 640G** in **MiniMed 670G**.




Ustvarjanje uporabniškega računa (če imate račun že ustvarjen, izberite državo »Slovenija« in jezik »Slovenščina«, kliknite »Nadaljuj«, vpišite uporabniško ime in geslo, ki ste si ga nastavili, in na drugi strani nadaljujte z navodili za odčitek):

1. Zaženite spletni brskalnik

Namig: ikona, ki jo iščete na računalniku



2. Pojdite na carelink.minimed.eu

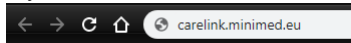

3. Izberite državo »Slovenija« in jezik »Slovenščina«.
4. Kliknite »Ustvarite račun«. Izberite državo **Slovenija** in jezik **slovenščina**, kliknite »Naprej«.
5. Izberite vrsto računa **Bolnik** ali **Druga oseba** in kliknite »Naprej«.
6. Izrazite soglasje za obdelavo podatkov in uporabo piškotkov: 4-krat zapored »Da« in »Naprej«.
7. Izberite uporabniško ime in geslo, geslo ponovite in vnesite svoj elektronski naslov.
8. S svojimi podatki izpolnite obrazec za včlanitev, odkljukajte možnost **Nisem robot** in kliknite »Pošlji«.
9. Včlanitev je zaključena. Kliknite »Nadaljuj«.
10. S kreiranim uporabniškim imenom in geslom se prijavite v svoj račun CareLink Personal.

POMEMBNO: uporabniško ime, elektronski naslov, s katerim ste se registrirali, in geslo si zapišite in varno shranite.

Odčitavanje podatkov iz črpalke

1. Izberite »Prenesi zdaj«.

Opomba: Pred prvim odčitkom je treba namestiti aplikacijo Uploader; sledite napotkom na zaslonu. Če imate aplikacijo Uploader že nameščeno, preskočite koraka a) in b).



- a) Prikazalo se vam bo okno »Orodje za prenos podatkov CareLink«. Kliknite »Prenesi namestitveni program orodja za prenos podatkov CareLink«.




- b) Sledite navodilom na zaslonu in namestite aplikacijo Uploader.

2. Prikazalo se bo okno **»Odpri Carelink Launcher«**. Kliknite »Odpri«.

Opomba: v različnih spletnih brskalnikih se lahko prikazuje različno. Če odčitka NE delate prvič, preskočite koraka a) in b).

Open CareLink Launcher?

https://carelink.minimed.eu wants to open this application.

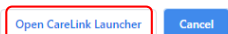

- a) Kliknite »Dodaj novo napravo«:

- b) Izberite vrsto naprave (izberite obliko naprave, ki jo imate) in kliknite »Naprej«.



Merilnik



Črpalka MiniMed™



Črpalka Paradigm™

- c) Potrdite izbrano vrsto naprave.



Serija MiniMed™ 600

- d) **Vklopite** povezovalno napravo v računalnik in počakajte, da jo sistem samodejno prepozna.
- e) Izberite **časovni razpon** za prenos podatkov in kliknite »Naprej«.
- f) **Pripravite napravo** za prenos podatkov.
- g) **Vnesite serijsko** številko na način, kot je prikazan na zaslonu in kliknite »Naprej«. Počakajte nekaj trenutkov, da se prenos konča.
- h) Po uspešnem prenosu kliknite »Izhod«.



Prenos je uspel

Paradigm™ 522


773574

08/07/2020


[Izhod](#)

Ustvarjanje poročil in pošiljanje zdravniku

1. Kliknite zavihek »Poročila«.

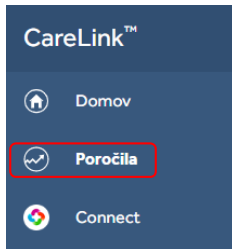


2. Izberite **obdobje želenega prikaza podatkov** (privzeto 7, 14, 30 dni, ali razpon po meri od / do).
Opomba: Svetujemo izbiro podatkov za obdobje 30 dni.

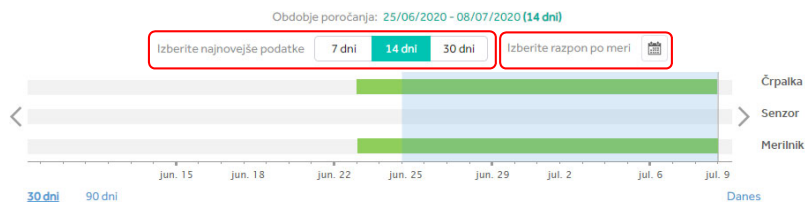


3. Izberite **želena poročila**. Neoznačena poročila so bela in brez kljukice, označena poročila so zelena in s kljukico.

*Opomba: Poročila **Ocena in napredek**, **Tedenski pregled in Bolus ob obroku z Bolus Wizard** so na voljo le za sistem **MiniMed 670G**.*

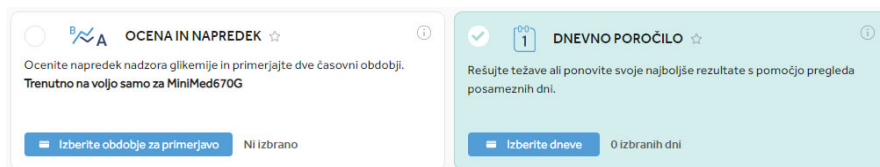

Opomba: Pri izbiri dnevnih poročil je potrebno označiti posamezne datume.

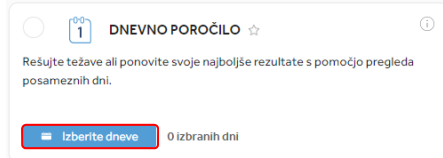

4. Kliknite »Ustvarjanje poročil« v desnem zgornjem kotu in datoteko shranite na poljubno mesto na svojem računalniku.

Poročilo, glede na dogovor z zdravnikom, prinesite (na USB ključku ali v tiskani obliki) s seboj na pregled ali ga kot priponko pošljite na elektronski naslov ambulante.

Več informacij in tehnična pomoč: podpora@zaloker-zaloker.si.