


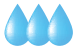
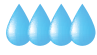


Izbor obloge

KOLIČINA IZLOČKA					
					
RANA					
Neokužena	PolyMem		curea P1		
	PolyMem MAX				
	curea P2		PolyMem WIC + PolyMem MAX		
Globoka S podminiranimi robovi S tuneli	PolyMem WIC + PolyMem MAX / curea P1				
Okužena Tveganje za okužbo	PolyMem SILVER		curea P1 DUO active		
	PolyMem MAX SILVER				
	curea P2		PolyMem WIC SILVER + PolyMem MAX / curea P1		
Globoka S podminiranimi robovi S tuneli	PolyMem WIC SILVER + PolyMem MAX / curea P1				

Protokol nameščanja in menjave

Pri namestitvi in menjavi oblog vedno ravnajte skladno z navodili za uporabo!

PolyMem®

- Rano pripravite skladno s protokolom vaše ustanove ali po navodilih zdravnika.
- Izberite takšno velikost obloge, ki bo prekrila tudi pordel predel okoli rane.
- Oblogo namestite s tiskano stranjo navzgor in nanjo zarišite robove rane.

POMEMBNO: zaradi hidrofilne narave oblog PolyMem® se lahko pojavi povečano izločanje, zato:

- v prvih dveh tednih oblogo menjajte pogosteje ali
- izberite bolj vpojno oblogo.
- Polnila PolyMem® namestite na rano tako, da zapolnite 2/3 rane, saj se obloga zaradi vpivanja izločka razširi. Pri tem uporabite ustrezno sekundarno oblogo.

MENJAVA OBLOGE:

- oblogo zamenjajte, ko izloček doseže na oblogi zarisane meje robov oz. po 7 dneh (kar je prej). Z redno menjavo preprečite maceracijo zdravega tkiva okoli rane;
- polnila PolyMem® zamenjajte preden izloček doseže robove rane oz. skladno s prakso vaše ustanove, a ne kasneje od 7 dni.

V večini primerov ob menjavi obloge rane ni treba čistiti.

curea

- Rano pripravite skladno s protokolom vaše ustanove ali po navodilih zdravnika.
- Izberite ustrezno velikost obloge in jo namestite ter zamenjajte skladno z navodili za uporabo.