

Omejčitve

- Nadmorska višina:** Ta sistem ni bil testiran na nadmorski višini nad 6301 metri.
- Hematokrit:** Hematokrit v območju od 0 % do 70 % ne vpliva bistveno na rezultate meritev v testirnih lističih CONTOUR NEXT.
- Ksiloza:** Ne uporabite med ali kmalu po testu absorpcije ksiloze. Ksiloza v krvi bo povzročila motnjo.

4

Simbol	Pomen simbola
	Funkcija Opomnik.
	Funkcija zvoka.
	7-, 14-, 30- in 90-dnevna povprečja.
	Skupno število izmerjenih vrednosti glukoze v krvi, ki se ne uporablja za izračun povprečja.

Zaslon Domov

Na zaslonu **Domov** sta na voljo 2 možnosti: **Dnevnik** in **Nastavitve** .

- Če želite zanašati simbol za **Dnevnik** ali **Nastavitve** pritisnite
- Ko simbol za **Dnevnik** utripa, pritisnite **OK** za vstop v **Dnevnik**.
- Za vstop v **Nastavitve**, pritisnite **OK**, medtem ko simbol za **Nastavitve** utripa.

Funkcije merilnika

Možnost dodatnega nanosa krvi **Second-Chance®** sampling na isti testni listič, če je prvotni vzorec krvi premajhen. Testni listič je obklopan tako, da preprosto »posrka« kriv v vrh testnega lističa. Krvi ne smete nanášati neposredno na zgornjo površino testnega lističa.

11

zmanj in odstranjevanje uporabljene lancete

1. Lancete ne vlecite iz sprožilne naprave in prsti.

2. Za navodila o samodejnem izmetu lancete glejte ločena navodila za sprožilno napravo, če so priložena kompletu.

⚠ OPOZORILO: Potencialna biološka nevarnost

- Sprožilna naprava, lancete in testni lističi so namenjeni za osebno uporabo. Uporabljati jih ne sme več oseb, četudi gre za družinske člane. Uporaba pri več osebah ni dovoljena.^{5,6}
- Vsi izdelki, ki pridejo v stik s človeško krvjo, se morajo obravnavati kot potencialni prenašalci nalezljivih obolenj.
- Uporabljene testne lističe in lancete vedno odstranite kot medicinski odpadke oziroma po navodilih zdravstvenega delavca.
- **ⓧ Lancet ne uporabite ponovno. Uporabljene lancete niso sterilne. Za vsako meritev uporabite novo lanceto.**
- Pred merjenjem in po njem si umijte roke z antibakterijskim milom in vodo ter jih dobro osušite. Tako ravnanje vedno, kadar rokujete z merinikom, sprožilno napravo ali testnimi lističi.

25

3. Če želite izbrati **Mesec/dan/leto (m/d)** ali **Dan.mesec.leto (d.m)**, pritisnite gumb **▲** ali **▼**, nato pritisnite **OK**.

4. Za spremembo leta (utripa) pritisnite gumb **▲** ali **▼**, nato pritisnite **OK**.

5. Za spremembo meseca (utripa) pritisnite gumb **▲** ali **▼**, nato pritisnite **OK**.

6. Za spremembo dneva (utripa) pritisnite gumb **▲** ali **▼**, nato pritisnite **OK**.

OBRNITE ZA OGLED HRBTNE STRANI

32

