


Contour
Evolving with you

GlucoContro.online

Bodite povezani s svojimi pacienti na daljavo*

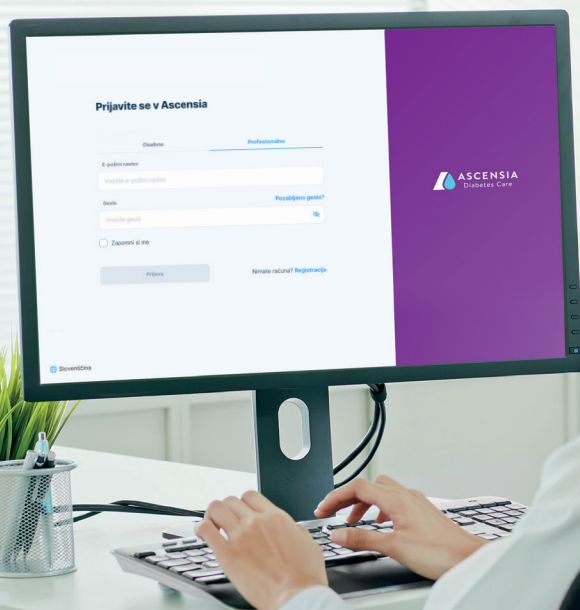

Za učinkovitejše vodenje, povabite
svoje paciente, da z vami delijo
rezultate glukoze v krvi.

www.zaloker-zaloker.si

*Pacienti morajo biti registrirani v aplikacijo GlucoContro.online in oddati dovoljenje za delitev svojih podatkov z zdravstvenim timom.



Enostaven dostop do vseh informacij o pacientu

Na enem zaslonu, z le enim klikom



Nadzorna plošča s splošno statistiko in seznamom vseh pacientov



Hiter in enostaven dostop do podatkov iz aplikacije CONTOUR®DIABETES, ki so shranjeni v oblaku CONTOUR®CLOUD.



Prilagojene informacije za vsakega pacienta posebej (ciljna območja, časovni okvirji)



Pavel Šmid ✓

36 let Tip 1

Zdravnik: Simon Brajnik



Ustvarjanje poročil (AGP* poročilo, PDF, tisk)



Povzetki za barvnim kodiranjem za hitro pregledovanje



Varno okolje za deljenje informacij z vami



Prenos CONTOUR® meritev glukoze brez dodatnih odobritev IT skrbnika



*Ambulantni profil glukoze

Nov način prikaza izmerjenih vrednosti glukoze

Meni za **hitri dostop**



Meritve **16**

Pov. št. mer./dan **5.33**

Brez meritve **0**

⚠ **7%**

Indikator vrednosti glukoze

⚠ **3**

Zelo visoko

⚠ **1**

Zelo nizko

⚠ **4.4**

Standardni odklon

8,7

mmol/L

Povprečje pred obrokom

⚠ **13.6**

mmol/L

Povprečje po obroku

45%

CV

Povzetek: Pomembne informacije za odločanje



Ravni glukoze v krvi:
Prikaz odstotka izmerjenih vrednosti v izbranem obdobju

Porazdelitev ravni glukoze v krvi:
Ogled gibanja izmerjenih vrednosti glukoze v krvi

Skupni dnevni inzulin/Ogljikovi hidrati/Aktivnost

Nedelja 14/03

mmol/L

⚠ **3.7**

⚠ **10.2**

⚠ **15.6**

14:53

⚠ **10.4**

18:33

⌚ **4.6**

22:03

Tabela meritev:
Preprost prikaz vseh vrednosti, za vsak dan posebej

	Skupaj meritve	Povprečje	Zelo visoko	Zelo nizko	Visoko	Cilj	Nizko	Stand. odklon
🕒 Na tešče	16	9.5 mmol/L	8%	3%	50%	38%	13%	4.3 mmol/L
🕒 Pred obrokom	3	3.8 mmol/L	0%	33%	0%	33%	67%	1.6 mmol/L
🕒 Po obroku	3	8.7 mmol/L	0%	0%	67%	33%	0%	2.4 mmol/L
🕒 Brez oznake	5	13.6 mmol/L	60%	0%	80%	20%	0%	3.4 mmol/L
⚙ Vse	5	9.3 mmol/L	0%	0%	40%	60%	0%	2.9 mmol/L

Povzetek rezultatov: Za bolj podrobno analizo pacientove glikemije

Pridružite se učinkovitemu vodenju sladkorne bolezni

Registracija v 3 korakih

1. Pojdite na glucocontro.online in kliknite Registracija
2. Izpolnite podatke
3. Počakajte na odobritev

Ustvarite račun

Vrsta računa

Oseбно

Profesionalno

Skrbnik

Izberite to vrsto računa, če ste sladkorni bolnik.

Izberite to vrsto računa, če ste zdravstveni delavec.

Izberite to vrsto računa, če želite skrbeti za nekoga s sladkorno boleznijo, vendar sami niste sladkorni bolnik - ica.

E-poštni naslov

Vnesite e-poštni naslov


Ime

Vnesite ime

Primek

Vnesite priimek

Kliknite "Dodaj novega pacienta"

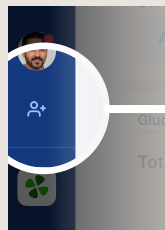

Dodaj novega pacienta

Ročno

QR koda

Ime

Vnesite ime

Primek

Vnesite priimek

Temu pacientu želim poslati e-poštno povabilo

Država

Slovenija

Izbirne informacije

Dodaj novega pacienta

Ročno

QR koda



✓ označuje, da je vaš pacient sprejel vabilo



Pavel Šmid ✓

36 let Tip 1

Zdravnik: Simon Brajnik



Informacije, svetovanje in podpora:

T: 01 542 51 11

E: info@zaloker-zaloker.si

W: zaloker-zaloker.si/za-stroko

© 2021 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Vse pravice pridržane.

Ascensia, Ascensia Diabetes Care logotip in Contour so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke družbe Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Apple in Applov logotip sta blagovni znamki Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah. App Store je zaščitna znamka družbe Apple Inc. Google Play in Google Play logotip sta blagovni znamki družbe Google LLC. Vse ostale blagovne znamke so last njihovih lastnikov in se uporabljajo izključno za informativne namene. Vsakršna povezava ali vnos ne smeta biti dovoljena.

Datum priprave: Maj 2021. PP-GluCo-GBL-0007

