


Enostaven in hiter način za delitev vaših rezultatov izmerjenih vrednosti glukoze

Postanite uporabnik aplikacije CONTOUR®DIABETES in se na daljavo povežite s svojim zdravstvenim timom.*

1

Prenesite aplikacijo CONTOUR®DIABETES

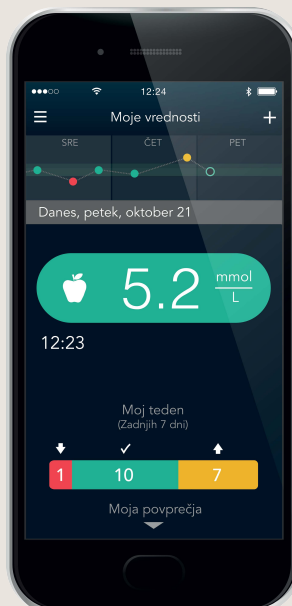

Brezplačni prenos




App Store

Google Play

Seznam združljivih naprav:
compatibility.contourone.com

2

Ustvarite svoj račun**

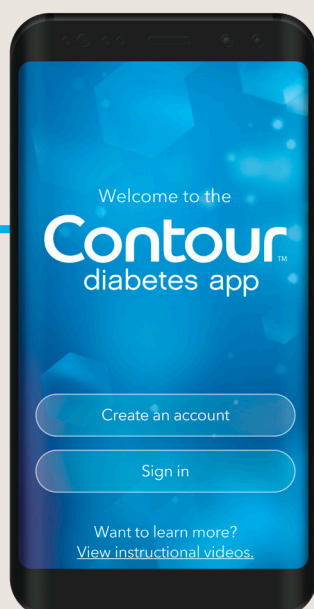

3

Povežite se s svojim merilnikom CONTOUR®



Več informacij:
www.zaloker-zaloker.si

*Pacienti morajo biti registrirani v aplikaciji GlucoContro.online in oddati dovoljenje za delitev njihovih podatkov z zdravstvenim timom.
**Aplikacija je na voljo v slovenskem jeziku.

Enostavno omogočanje oddaljenega dostopa

Počakajte na vabilo vašega zdravstvenega delavca.

Vabilo preko e-naslova

ali

Vabilo s QR kodo

Ko prejmete vabilo na vaš e-naslov, kliknite na povezavo

1

Dodaj novega pacienta

Ročni vnos QR koda

Obvezni podatki

Ime: Priimek:

Država:

Izbirno

Želim poslati vabilo po e-pošti pacientu

E-naslov:

Dodaj novega pacienta

Skenirajte QR kodo

Dodaj novega pacienta

Ročni vnos QR koda



2

Prijavite se s svojim uporabniškim imenom in geslom aplikacije CONTOUR®DIABETES

3

Izpolnite svoje podatke

4

Sprejmite vabilo



Svetovanje in podpora:

Zaloker & Zaloker d.o.o.
www.zaloker-zaloker.si

Prijava v Ascensia

Pacient Zdravstveni delavec

Contour Empowering with you Za prijavo v svoj račun uporabite Contour Cloud poverilnice.

E-naslov:

Geslo: [Ste pozabili geslo](#)

Zapomni si me

Prijava Še nimate računa? [Vpišite se](#)