



NAVODILA ZA UPORABO


InsulinSaver je izdelek, ki je bil razvit za pomoč osebam s sladkorno boleznijo, ki se zdravijo z inzulinom, da bi ugotovili, kakšnim temperaturam je, ali je bil izpostavljen, njihov inzulin.

InsulinSaver je nastavljen tako, da daje signal pri temperaturah, ki jih je več proizvajalcev inzulina določilo kot najvišjo/najnižjo temperaturo za inzulin, to je od +2 °C do +30 °C.

Življenjska doba baterije naprave InsulinSaver, ki ni bila izpostavljena previsoki ali nizki temperaturi, je 6-12 mesecev, ob predpostavki, da je enota vklopljena.

Velja 12-mesečna garancija, če enota ni bila izrabljena.


1. Zapišite datum začetka uporabe:

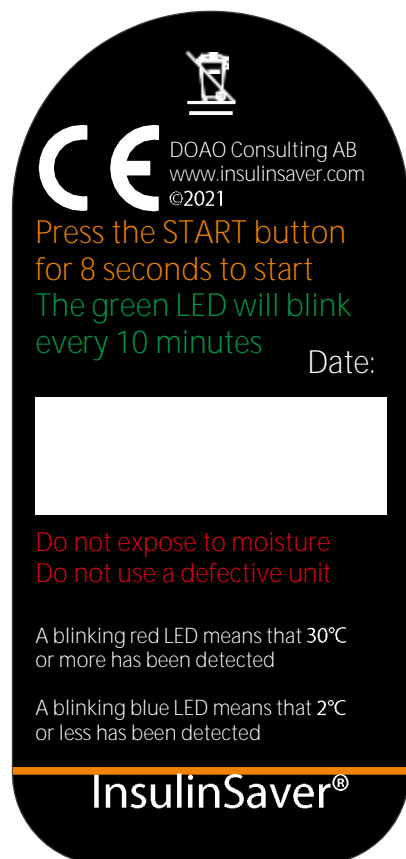

Zapišite si datum začetka uporabe naprave.

Zapišite si datum začetka uporabe naprave InsulinSaver, da boste lahko spremljali trajanje baterije. To storite na zadnji strani naprave InsulinSaver.


2. Aktivirajte InsulinSaver:

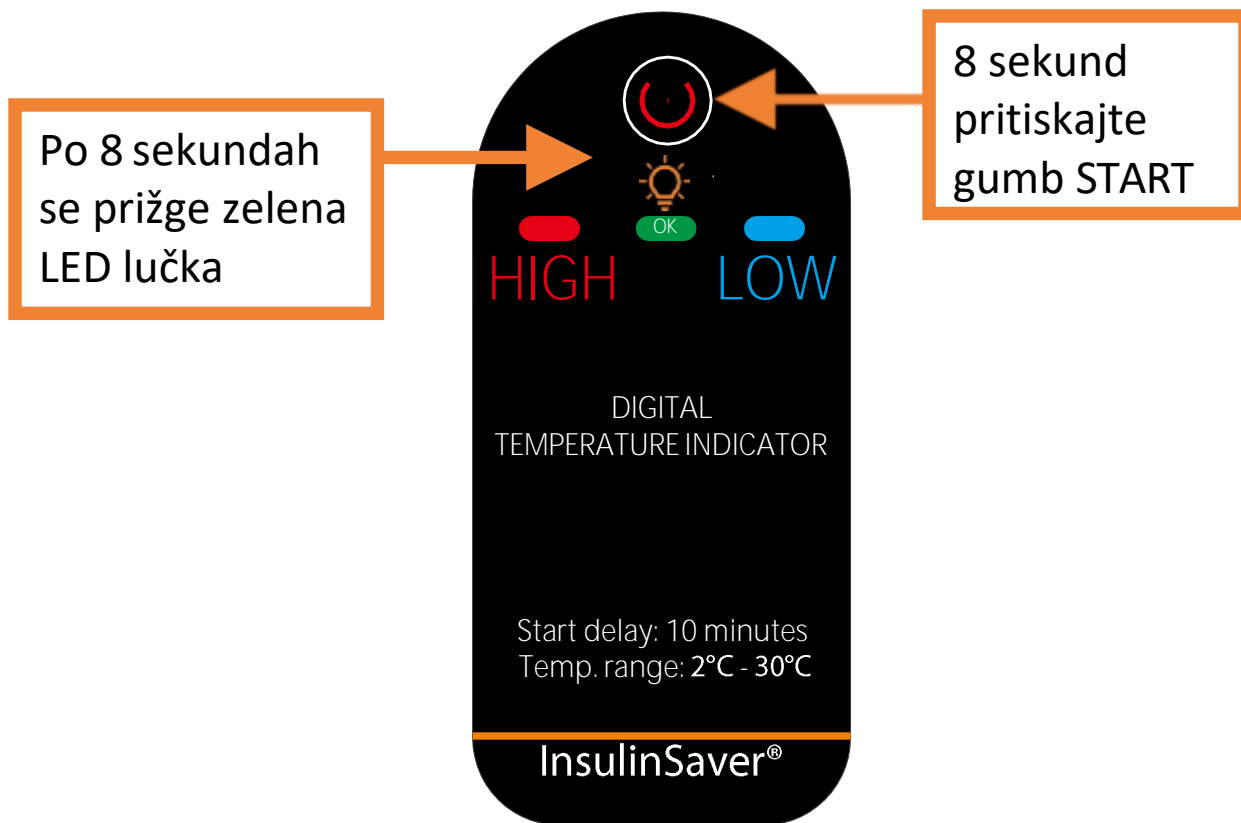

Za zagon naprave InsulinSaver 8 sekund držite gumb START pritisnjen. Prižgala se bo zelena LED lučka.

InsulinSaver začne beležiti in analizirati temperaturo po 10 minutah od zagona.


3. Preverite, ali je InsulinSaver vključen:

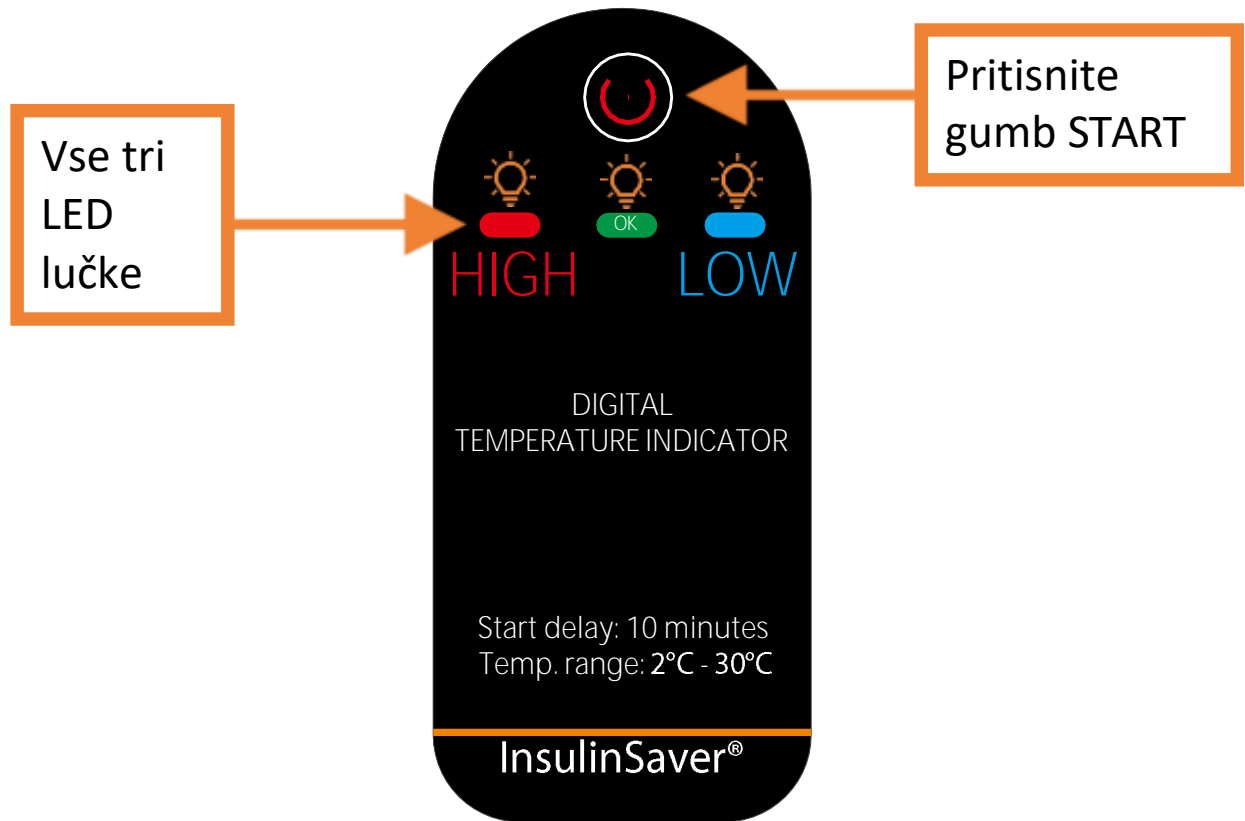

Enkrat pritisnite gumb START.

Če InsulinSaver deluje, morajo utripati vse tri LED lučke.


4. Kako deluje InsulinSaver:

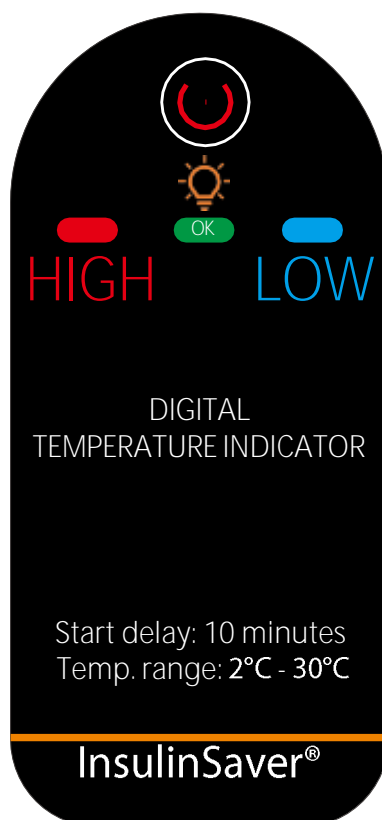

Temperatura znotraj območja 2 °C – 30 °C


Zelena LED lučka na sredini vsakih 10 minut signalizira, da je vaša naprava InsulinSaver v dovoljenem temperaturnem območju.

Temperatura nad 30 °C

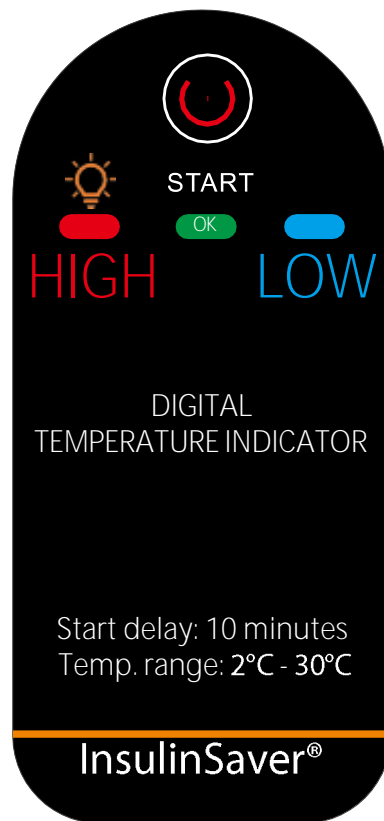


Če je bil InsulinSaver več kot 5 minut izpostavljen temperaturi nad 30 °C, bo rdeča LED lučka utripala vsakih 5 sekund.

Temperatura pod 2 °C

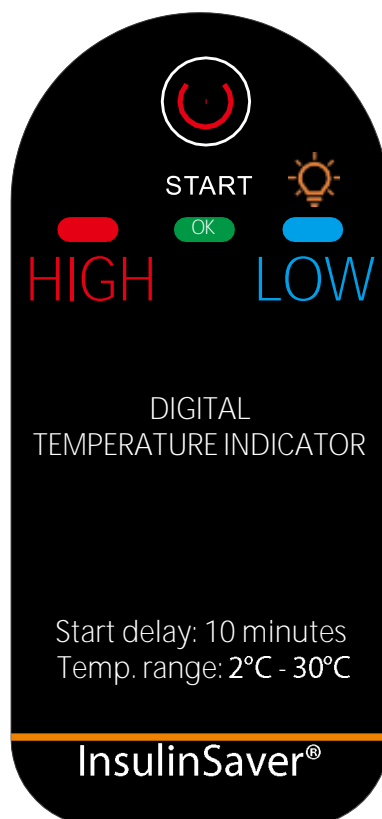

Če je bil InsulinSaver več kot 5 minut izpostavljen temperaturi pod 2 °C, bo modra LED lučka utripala vsakih 5 sekund.


5. Izklop/ponastavitev naprave InsulinSaver:

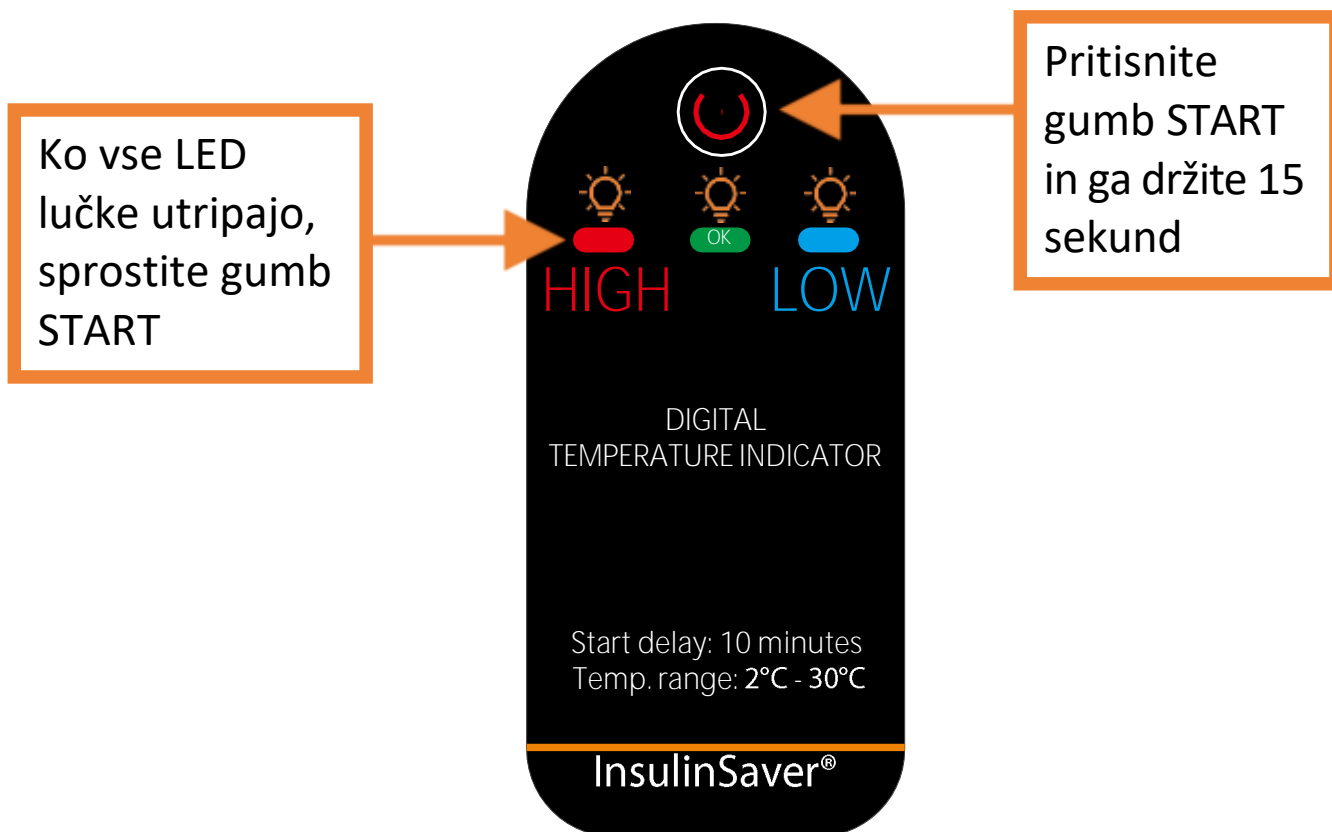

Za izklop naprave InsulinSaver pritisnite in držite gumb START približno 15 sekund. Ko vse LED lučke utripajo, spustite gumb START. Vsi alarmi se bodo ponastavili.

Če ste to naredili z namenom ponastavitve naprave, jo lahko zdaj ponovno zaženete (glejte 2. poglavje).

6. Preverite, ali je InsulinSaver izključen:

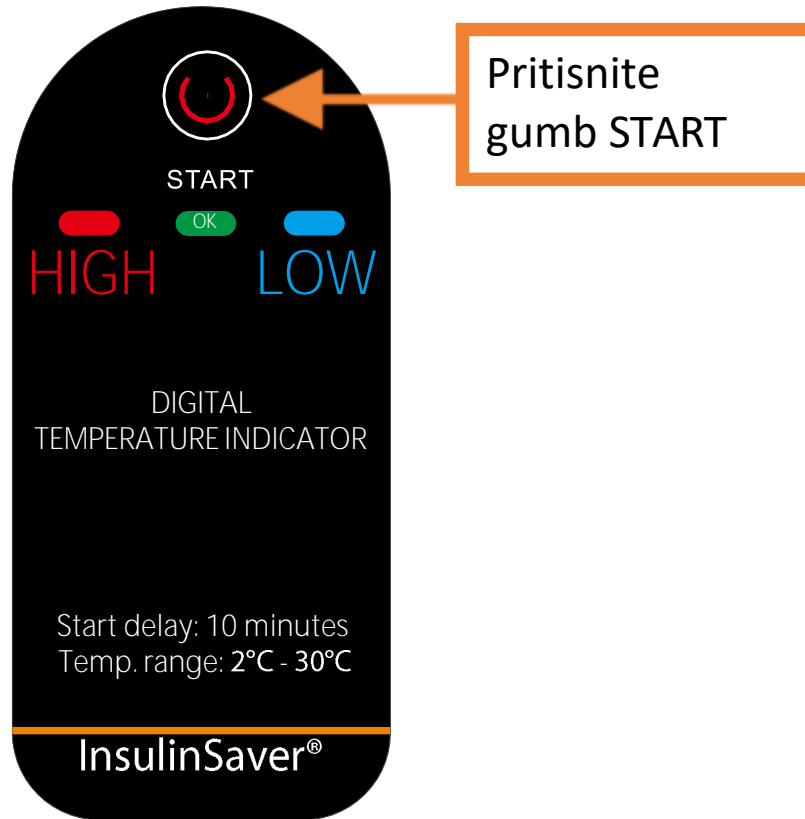

Enkrat pritisnite gumb START. Če je naprava InsulinSaver izklopljena, LED lučke ne utripajo.

OPOMBA!

- Uporaba naprave InsulinSaver ni zagotovilo, da lahko inzulin uporabite v katerih koli okoliščinah.
- InsulinSaver je pripomoček, ki vam pomaga zavedati se temperaturnih nihanj.
- InsulinSaver ni odporen proti močnim udarcem ali visokemu pritisku.

ODSTRANJEVANJE ODPADKOV

- Naprave InsulinSaver ne zavržite med komunalne odpadke.
- InsulinSaver odstranite kot elektronski odpadek.

INFORMACIJE IN NAROČILA:

Zaloker & Zaloker d.o.o.
Kajuhova ulica 9
1000 Ljubljana

Tel: 01 587 40 93

