

KRATKI NAPOTKI ZA PRENOS PODATKOV V PROGRAMSKO OPREMO CARELINK - v. 14.02

Programska oprema **CareLink™ Personal** je brezplačna spletna aplikacija v slovenskem jeziku. Omogoča prenos podatkov iz inzulinske črpalke in sistema za neprekinjeno merjenje glukoze na vaš računalnik. Poročilo nato lahko delite s svojim zdravnikom. Napotki, prikazani na zaslonih, se lahko prikazujejo v različnih jezikih, odvisno od nastavitve vašega računalnika.

Dostop in ustvarjanje računa

Za prenos podatkov potrebujete inzulinsko črpalko in računalnik z dostopom do spleta ter povezovalno napravo za prenos podatkov.

- Merilnik glukoze v krvi **Contour Next Link** za prenos iz črpalke **Paradigm VEO**.
- Merilnik glukoze v krvi **Contour Next Link 2.4** za prenos iz črpalke **MiniMed™ 640G** in **MiniMed™ 670G**.
- **Modri USB ključek** za odčitavanje iz črpalke **MiniMed™ 780G** (v primeru, ko ne uporabljate aplikacije **MiniMed™ Mobile**, sicer je prenos v **CareLink™** samodejen).




Ustvarjanje uporabniškega računa

1. **Zaženite** spletni brskalnik.

Opomba - podprti operacijski sistemi: Microsoft® Windows® 7, 8.1, 10, macOS®: 10.14 Mojave, 10.15 Catalina.



2. Pojdite na carelink.minimed.eu

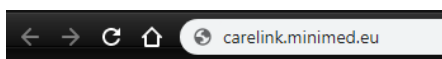

Če imate račun že ustvarjen, izberite državo »**Slovenija**« in jezik »**Slovenščina**« ter kliknite **Nadaljuj**. Vpišite uporabniško ime in geslo, ki ste ga nastavili, ko ste si ustvarili račun, in nadaljujte na drugi strani z navodili za odčitek.

3. Pod prijavnim obrazcem kliknite na »**Ustvari račun**«.
4. Izberite državo »**Slovenija**« in jezik »**Slovenščina**«.
5. Kliknite »**Ustvarite račun**«. Izberite državo »**Slovenija**« in jezik »**slovenščina**«, kliknite **Naprej**.
6. Izberite vrsto računa »**Bolnik**« in kliknite **Naprej**.

7. Izrazite soglasje za obdelavo podatkov in uporabo piškotkov: 4-krat zapored **Da** in nato **Naprej**.
8. V podatkih za prijavo si **določite** si uporabniško ime in geslo, geslo ponovite in vnesite svoj elektronski naslov.
9. **Izpolnite** obrazec Podatki o bolniku s svojimi podatki.
10. Na vaš elektronski naslov je bila poslana potrditvena koda. V vaši elektronski pošti poiščite sporočilo **Potrditvena koda za CareLink™ Personal**.
11. V prostor **vpišite** prejeto potrditveno kodo in spodaj odkljukajte **Nisem robot** (I'm not a robot). Označite predmete, ki jih določi varnostni sistem in kliknite **Pošlji**.
12. Včlanitev je končana, kliknite **Nadaljuj**.
13. Zdaj se prijavite v svoj račun CareLink™ Personal z ustvarjenim uporabniškim imenom in geslom.

Potrdite svojo identiteto

Potrditvena koda je bila poslana na vaš e-poštni naslov
vaš.email@nekaj.si

Potrditvena koda

POMEMBNO: uporabniško ime, geslo in elektronski naslov, s katerim ste se registrirali, si zapišite in varno shranite.


Odčitavanje podatkov iz črpalke

Povezovalne naprave (merilnika) še ne vklopite v računalnik.

1. Izberite »**Prenesi zdaj**«.
Opomba: Pred prvim odčitkom je treba namestiti aplikacijo Uploader, sledite napotkom na zaslonu. Če imate aplikacijo Uploader že nameščeno preskočite koraka a) in b).

 Prenesi zdaj

- a) Prikazalo se vam bo okno »Orodje za prenos podatkov CareLink«, kliknite »**Prenesi namestitveni program orodja za prenos podatkov CareLink**«.

 Prenesi namestitveni program orodja za prenos podatkov CareLink™

- b) Sledite navodilom na zaslonu in namestite aplikacijo Uploader.
2. Prikazalo se bo okno »**Odpri Carelink Launcher**«, kliknite **Odpri**.
Opomba: v različnih spletnih brskalnikih se lahko prikazuje različno. Če odčitka NE delate prvič, preskočite korak a) in b).

Open CareLink Launcher?

<https://carelink.minimed.eu> wants to open this application.

Open CareLink Launcher

Cancel

- a) Kliknite »**Dodaj novo napravo**«.
- b) Izberite **vrsto naprave** (izberite napravo, ki jo imate) in kliknite **Naprej**.



- c) **Potrdite** ustrezen model naprave.




- d) **Vklopite** povezovalno napravo v računalnik in počakajte, da jo sistem samodejno prepozna.
- e) Izberite **časovni razpon** za prenos podatkov in kliknite **Naprej**.
- f) **Pripravite napravo** za prenos podatkov, kot je napisano na zaslonu.
- g) **Vnesite serijsko številko** na način, kot je prikazan na zaslonu in kliknite **Naprej**, počakajte nekaj trenutkov, da se prenos konča.
- h) Po uspešnem prenosu kliknite **Izhod**.



Prenos je uspel

Ustvarjanje poročil in pošiljanje zdravniku

1. Kliknite zavihek **Poročila**, ki je na levi strani.

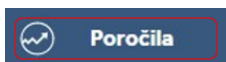

2. Izberite **obdobje zelenega prikaza podatkov** (privzeto 7, 14, 30 dni ali razpon po meri od / do) ter **vir podatkov** (inzulinska črpalka, CGM ali merilnik).

Opomba: Svetujemo izbiro podatkov za obdobje 30 dni, razen, če ste s strani svojega diabetologa prejeli drugačne napotke.



3. Spodaj, pod prikazom obdobja, izberite **želena poročila**.

Neoznačena poročila so bela in brez kljukice, označena poročila so obarvana modro in imajo kljukico.

Opomba: svetujemo, da izberete vsa poročila, ki so na voljo.

Uporabniki MiniMed™ 640G, MiniMed™ 670G in MiniMed™ 780G v poročilu Ocena in napredek izberite tudi obdobje za primerjavo. Svetujemo 14 dni ali 1 mesec.

Opomba: Pri izbiri dnevnih poročil je treba označiti posamezne datume.

4. Kliknite »**Ustvarjanje poročil**« v desnem zgornjem kotu in datoteko shranite na poljubno mesto na svojem računalniku.

Poročilo, glede na dogovor z zdravnikom, prinesite (na USB ključku ali v tiskani obliki) s seboj na pregled ali ga kot pripenko pošljite na elektronski naslov ambulante.

Več informacij in tehnična pomoč: podpora@zaloker-zaloker.si