

KRATKI NAPOTKI ZA PRENOS PODATKOV V PROGRAMSKO OPREMO CARELINK - v. 14.03

Programska oprema **CareLink Personal** je brezplačna spletna aplikacija v slovenskem jeziku. Omogoča prenos podatkov iz inzulinske črpalke in sistema za neprekinjeno merjenje glukoze na vaš računalnik. Poročilo nato lahko delite s svojim zdravnikom. Napotki, prikazani na zasloneh, se lahko prikazujejo v različnih jezikih, odvisno od nastavitve vašega računalnika.

Dostop in ustvarjanje računa

Za prenos podatkov potrebujete inzulinsko črpalko in računalnik z dostopom do spleta, ter povezovalno napravo za prenos podatkov.

- Merilnik glukoze v krvi **Contour Next Link** za prenos iz črpalke **Paradigm VEO**. 
- Merilnik glukoze v krvi **Contour Next Link 2.4** za prenos iz črpalke **MiniMed 640G** in **MiniMed 670G**. 
- **Modri USB ključek** za odčitavanje iz črpalke **MiniMed 780G** (v primeru, ko ne uporabljate aplikacije MiniMed Mobile, sicer je prenos v CareLink samodejen).



Ustvarjanje uporabniškega računa


(če imate račun že ustvarjen, izberite državo in jezik, kliknite »Nadaljuj«, vpišite uporabniško ime in geslo, ki ste si ga nastavili in nadaljujte na drugi strani z navodili za odčitek):

1. **Zaženite** spletni brskalnik.

Opomba - podprti operacijski sistemi: Microsoft® Windows® 8.1, 10, 11; macOS®: 10.15, 11.0, 12.x; iOS 13.x, 14.x, 15.x



2. Pojdite na carelink.minimed.eu

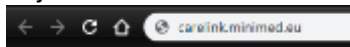

3. **Izberite** »Ustvarite račun (Create an Account)«.
4. Izberite državo in jezik, kliknite **Naprej**.
5. Izberite vrsto računa **Bolnik** ali **Druga oseba** in kliknite **Naprej**.

6. Izrazite soglasje za obdelavo podatkov in uporabo piškotkov: 4-krat zapored **Da** in **Naprej**.
7. **Izberite** uporabniško ime in geslo, geslo ponovite in vnesite svoj elektronski naslov.
8. **Izpolnite** obrazec za včlanitev s svojimi podatki, odključajte možnost **Nisem robot** (po potrebi izpolnite tudi preverjanje reCaptcha) in kliknite **Pošlji**.
9. Na vaš e-poštni naslov je bila poslana **potrditvena koda**. V vaši elektronski pošti poiščite sporočilo Potrditvena koda za CareLink™ Personal.

Kodo vnesite v okence, ki je prikazano na spletni strani Carelink.

Potrdite svojo identiteto

Potrditvena koda je bila poslana na vaš e-poštni naslov
vaš_email@nekaj.si

10. Prijava je končana, kliknite **Nadaljuj**.
11. Zdaj se prijavite v svoj račun CareLink™ Personal z ustvarjenim uporabniškim imenom in geslom.

Potrditvena koda

12.

POMEMBNO: uporabniško ime, geslo in elektronski naslov, s katerim ste se registrirali, si zapišite in varno shranite.

Odčitavanje podatkov iz črpalke

Povezovalne naprave (merilnik) še ne vklopite v računalnik.

1. Izberite **Prenesi zdaj**.

Opomba: Pred prvim odčitkom je treba namestiti aplikacijo CareLink Uploader, sledite napotkom na zaslonu. Če imate aplikacijo CareLink Uploader že nameščeno preskočite koraka a) in b).

Prenesi zdaj

- a) Prikazalo se vam bo okno »Orodje za prenos podatkov CareLink«, kliknite **Prenesi namestitveni program orodja za prenos podatkov CareLink**.

Prenesi namestitveni program orodja za prenos podatkov CareLink™

- b) Sledite navodilom na zaslonu in namestite aplikacijo CareLink Uploader.

2. Prikazalo se bo okno »**Odpri CareLink Launcher**«, kliknite **Odpri**.

Opomba: v različnih spletnih brskalnikih se lahko prikazuje različno. Če odčitka NE delate prvič, preskočite korak a) in b).

Open CareLink Launcher?

https://cordini.nimmod.eu wants to open this application.

Open CareLink Launcher Cancel

a) Kliknite **Dodaj novo napravo**

b) Izberite **vrsto naprave** (izberite obliko naprave, ki jo imate) in kliknite **Naprej**.



c.) **Potrdite** ustrezen model naprave.



d.) **Vklopite** povezovalno napravo v računalnik in počakajte, da jo sistem samodejno prepozna.

e.) Izberite **časovni razpon** za prenos podatkov in kliknite **Naprej**.

f.) **Prpravite napravo** za prenos podatkov, kot je napisano na zaslonu.

g.) **Vnesite serijsko številko** na način, kot je prikazan na zaslonu in kliknite **Naprej**, počakajte nekaj trenutkov, da se prenos konča.

h.) Po uspešnem prenosu kliknite **Izhod**.



Ustvarjanje poročil in pošiljanje zdravniku

1. Kliknite zavihek **Poročila**, ki je na levi strani.



2. Izberite **obdobje zelenega prikaza podatkov** (privzeto 7, 14, 30 dni ali razpon po meri od / do) ter **vir podatkov** (inzulinska črpalka, CGM ali merilnik).

Opomba: Svetujemo izbiro podatkov za obdobje 30 dni, razen, če ste s strani svojega diabetologa prejeli drugačne napotke.



3. Spodaj, pod prikazom obdobja, izberite **želena poročila**.


Neoznačena poročila so bela in brez kljukice, označena poročila so obarvana modro in imajo kljukico.

Opomba: svetujemo, da izberete vsa poročila, ki so na voljo.

Uporabniki MiniMed 640G, MiniMed 670G in MiniMed 780G v poročilu Ocena in napredek izberite tudi obdobje za primerjavo. Svetujemo 14 dni ali 1 mesec.



Opomba: Pri izbiri dnevnih poročil je treba označiti posamezne datume.

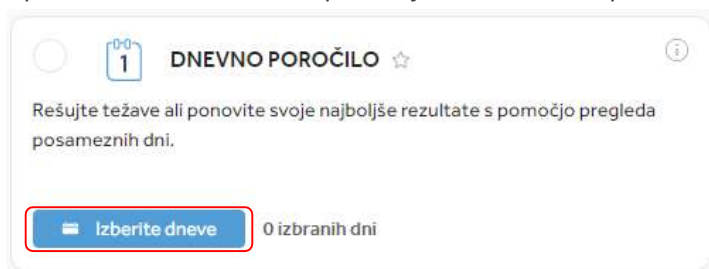

4. Kliknite **Ustvarjanje poročil** v desnem zgornjem kotu in datoteko shranite na poljubno mesto na svojem računalniku.

Poročilo, glede na dogovor z zdravnikom, prinesite (na USB ključku ali v tiskani obliki) s seboj na pregled ali ga kot pripombo pošljite na elektronski naslov ambulante.

Več informacij in tehnična pomoč: podpora@zaloker-zaloker.si