

NAPOTKI ZA NASTAVITEV APLIKACIJE MINIMED MOBILE NA PRENOSNEM TELEFONU

Aplikacija MiniMed Mobile je brezplačna aplikacija za uporabnike inzulinske črpalke MiniMed™ 780G in MiniMed™ 740G. Aplikacija omogoča spremljanje dogajanja na črpalki na zaslonu prenosnega telefona: uporabnik lahko spremlja gibanje svoje glukoze, dobiva opozorila in preverja stanje rezervoarja ali baterije.

Aplikacija je namenjena le spremljanju, zato preko nje upravljanje s črpalko ni možno – uporabnik mora vse aktivnosti opraviti na črpalki (npr. dodati bolus ali potrditi opozorilo).

Aplikacija MiniMed Mobile omogoča tudi samodejno pošiljanje podatkov v oblak CareLink. Tam lahko ustvarite poročila in jih delite s svojim zdravnikom. V CareLink se lahko poveže do 5 drugih oseb, ki na svojih prenosnih telefonih v realnem času spremljajo uporabnika inzulinske črpalke, vidijo gibanje njegove glukoze in prejema opozorila pred nizko ali visoko vrednostjo. Aplikacija za povezane skrbnike se imenuje CareLink Connect in vsak skrbnik si jo namesti na svoj telefon.

Ob vaši privolitvi se lahko zdravnik neposredno poveže v vaš račun CareLink in si ogleda vaše rezultate.



1. Namestitev aplikacije MiniMed Mobile

(Opomba: na različnih mobilnih telefonih so lahko prikazi različni)



1. V trgovini Google play (Android naprave) ali App Store (iOS naprave) poiščite aplikacijo MiniMed Mobile in jo namestite.




2. Odprite aplikacijo.
3. Preberite opise delovanja aplikacije in vsako okno potrdite s klikom »Napreje«.

2. Ustvarjanje uporabniškega računa CareLink



1. Izberite državo »Slovenija«.
2. Kliknite »Registracija«.

Če ste CareLink račun že ustvarili, kliknite »Prijava« ter vpišite svoje uporabniško ime in geslo.

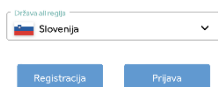




3. Potrdite pogoje uporabe. Dokumenta 'Pogoji uporabe' in 'Izjava o zasebnosti' morate najprej odpreti, da se obarva možnost »Da«, nato izberite »Da« in »Naprej«.

4. Potrdite starost za soglasje. Kliknite »Naprej«.

5. Potrdite soglasja za uporabo podatkov in piškotke. Po vsaki potrditvi kliknite »Naprej«.

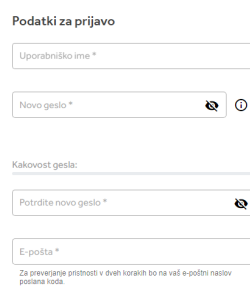

6. Določite uporabniško ime in geslo, geslo ponovite in vnesite svoj elektronski naslov.


7. Izpolnite podatke o bolniku / uporabniku in podatke za obveščanje.

Kliknite »Pošlji«.

8. Na vaš e-poštni naslov je bila poslana potrditvena koda. V svoji elektronski pošti poiščite sporočilo 'Potrditvena koda za CareLink™ Personal'.

9. Kodo vnesite v okence, ki je prikazano na zaslonu prenosnega telefona.

Potrdite tudi preverjanje 'reCAPTCHA'.

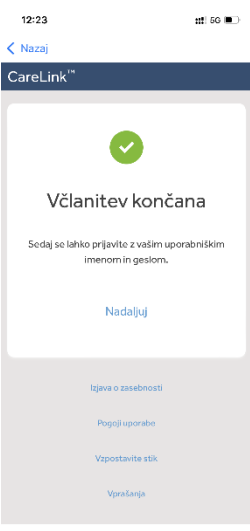


10. Včlanitev je končana.

Kliknite »Nadaljuj«.



11. U ustvarjenim uporabniškim imenom in geslom se prijavite v svoj račun CareLink Personal.

POMEMBNO: uporabniško ime, geslo in elektronski naslov, s katerim ste se registrirali, si zapišite in varno shranite.

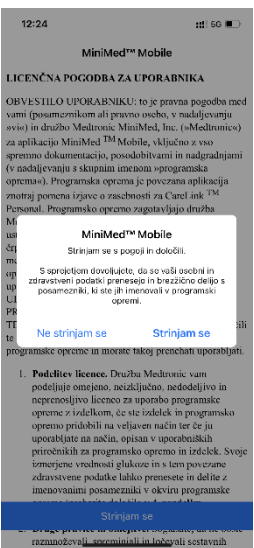

12. Prejeli boste več oken z razlago in potrebnimi potrditvami – kliknite »Strinjam se«, »Naprej« ali »Dovoli«.



13. Preverite, če imate na telefonu:

- Vklopljeno nastavitvev Bluetooth
- Vklopljene mobilne podatke


Kliknite »Začni«.



14. Potrdite, da ima vaša črpalka na desnem gumbu simbol "diamant".


Kliknite »**Da, moja črpalka ima ta simbol**«.

Z aplikacijo sta združljivi črpalke MiniMed™ 780G in MiniMed™ 740G.

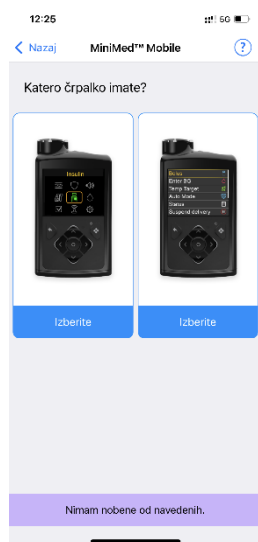

15. Izberite in potrdite model črpalke:

- MiniMed™ 780G (levo)
- MiniMed™ 740G (desno)

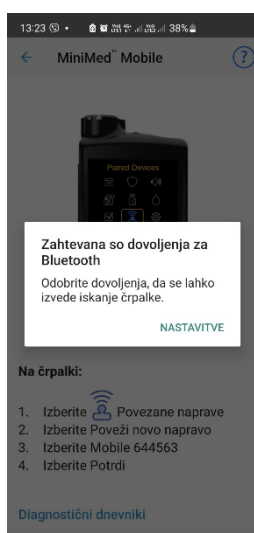

16. Potrdite dovoljenja za Bluetooth in dovoljenja za obvestila.

Po potrebi v Nastavitvah telefona omogočite dovoljenja.

Prikazi se lahko razlikujejo glede na vrsto in nastavitve prenosnega telefona.




17. **Zdaj vzemite črpalko** in sledite navodilom na zaslону telefona:

Na črpalki pojdite v meni, **Povezane naprave**.


Izberite »**Poveži novo napravo**« in počakajte.

Na črpalki se prikaže številka telefona Mobile XXXXXXXX.

Na črpalki potrdite številko.

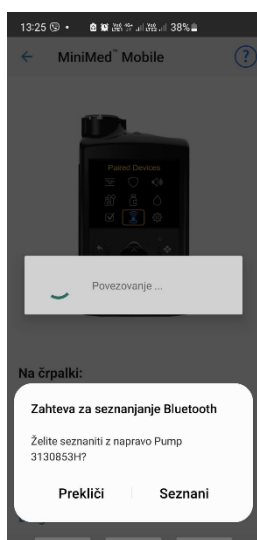



18. Na telefonu kliknite »**Seznani**« (dvakrat).

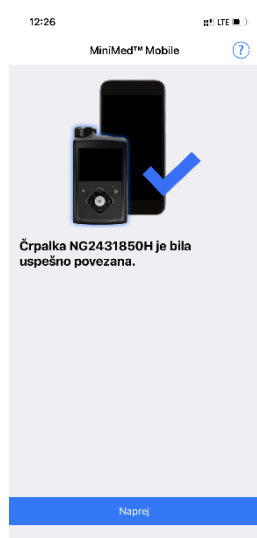


19. Črpalka je bila uspešno povezana. Kliknite »**Naprej**«.

Črpalko lahko pospravite.

Nadaljujte na telefonu.

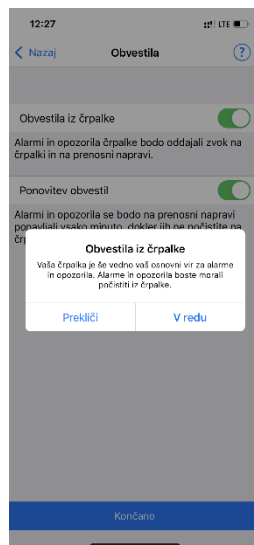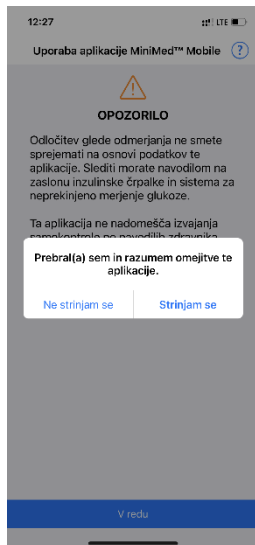

20. Preberite in potrdite opozorila in obvestila. Kliknite »Strinjam se«, »V redu«, »Dovoli« ali »Naprej«.

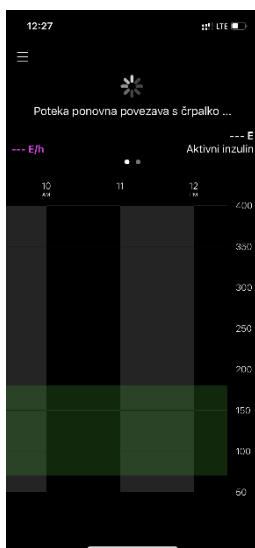

21. Počakajte nekaj minut, da se vzpostavi povezava.