

SIBIONICS GS1 – KRATKA NAVODILA ZA UPORABO

I. PRENOS APLIKACIJE

1. NALOŽITE APLIKACIJO SIBIONICS



App za Android



App za iOS

OPOMBA: Vpišite elektronski naslov, na katerega v postopku prijave prejmete potrditveno KODO.

2. VSTAVITE SENZOR (oglejte si video)



Najprej vstavite nov senzor.


Poveži nov senzor

Kako vstaviti senzor

II. VSTAVITEV SENZORJA

1. IZBIRA MESTA VSTAVITVE

Senzor se namešča na zadnji del nadlakti, na mehko mesto, kjer je največ **podkožne maščobe**, na **zgornjo tretjino nadlakti**.

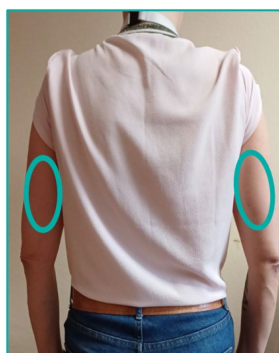

- **Izogibamo** se mestom, kjer so **znamenja, brazgotine, strije, izbokline in poškodovanim predelom kože**.
- Senzorja ne vstavljamo **neposredno nad mišico**.

2. PRIPRAVA MESTA VSTAVITVE

Očistimo in **razkužimo** površino kože, kamor vstavljamo senzor. Uporabimo **alkoholni robček** in mesto obrišemo v smeri urnega kazalca, v treh krogih od sredine navzven.



- Za preprečevanje težav na koži, redno **menjamo mesta namestitve**.



1) Odlepimo zaščitno folijo na senzorju.



2) Odpremo pokrovček na aplikatorju.




3) Poravnamo izboklino na aplikatorju z utorom na senzorju.



4) Senzor postavimo na ravno in trdno površino. Močno pritismo do konca navzdol. Dvignemo aplikator.



5) Odstranimo zaščitno sponko

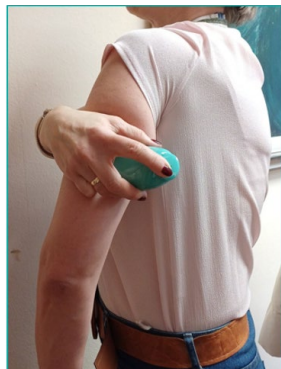

6) Aplikator prislonimo tesno na izbrano mesto in pritismo sprožilni gumb na vrhu.



7) Aplikator odstranimo naravnost stran od senzorja



8) Namestimo priloženi obliž

3. SKENIRAJTE QR KODO SENZORJA NA ŠKATLI



Škatlo shranimo do zadnjega dne uporabe senzorja (14 dni), potem jo zavržemo.

III. UPORABA SENZORJA

1. SENZOR SE PO SKENIRANJU 1 URO OGREVA

Počakajte ...

Ogrevanje

5 9 : 5 0

2. PO 1 URI ZAČNE PRIKAZOVATI IZMERJENE VREDNOSTI

TRENTUTNA VREDNOST
GLUKOZE IN SMER ↑↓

- ↑ Hitro zviševanje
- ↗ Počasno zviševanje
- Stabilna glukoza
- ↘ Počasno zniževanje
- ↓ Hitro zniževanje


ČASOVNO OBDOBJE
PRIKAZA KRIVULJE
GLUKOZE

ALARM ZA VISOKO VREDNOST
(nastavljiv)


KRIVULJA GLUKOZE

ALARM ZA NIZKO VREDNOST
(nastavljiv)


PRIMERI VPISA DOGODKOV

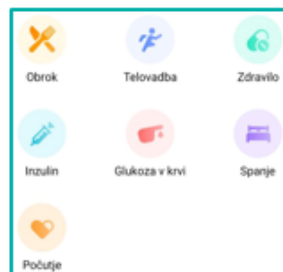

SLIKA
OBROKA

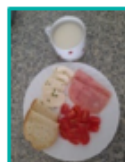


VPIS DOGODKOV

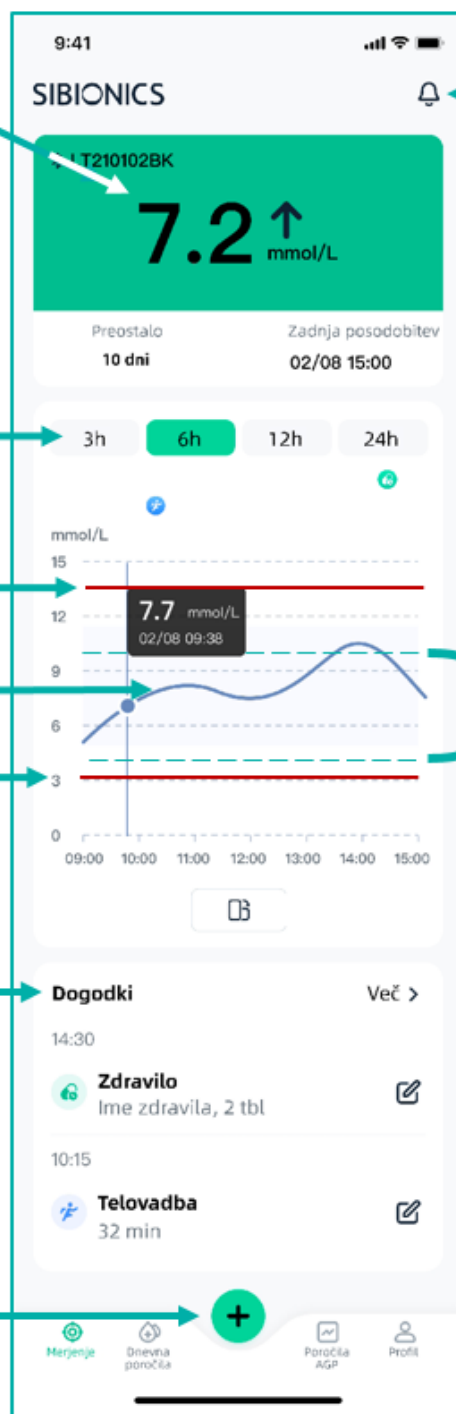

OBVESTILA

CILJNO
OBMOČJE (TIR)
3,9-10 mmol/L

3. NASTAVITEV ALARMOV

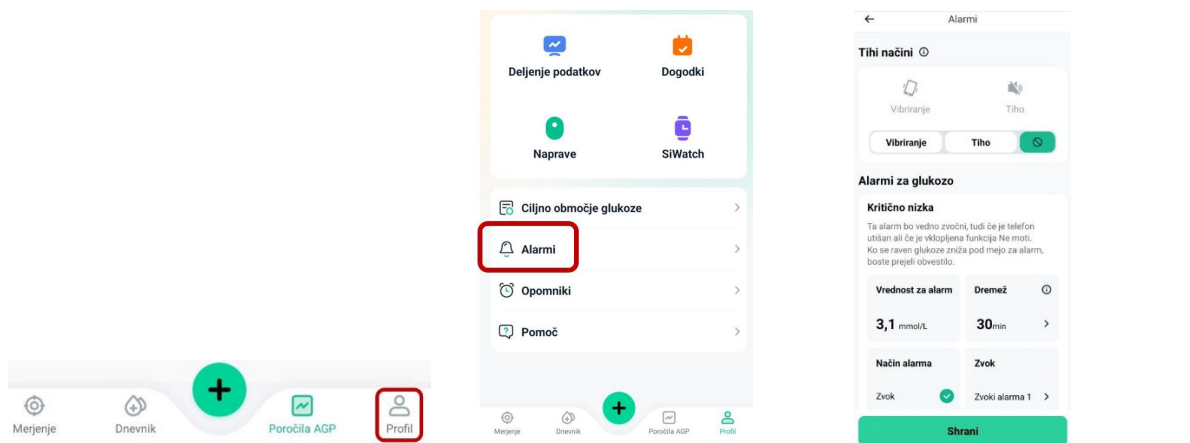

Kliknite **Profil**

Kliknite **Alarmi**

Nastavite in **vklopite** zelene alarme

4. MENJAVA SENZORJA

Senzor preneha delovati po 14 dneh.


Odstranite senzor in **vstavite novega** na **drugo mesto**. Ponovite postopek vstavitve senzorja pod točko II. VSTAVITEV SENZORJA.



5. DELJENJE PODATKOV O MERITVAH Z ZDRAVNIKOM ALI EDUKATORJEM

Povežite se z zdravstvenim osebjem preko **ambulantnega programa ProView** (kliknite **Sprejmite**).

ALI

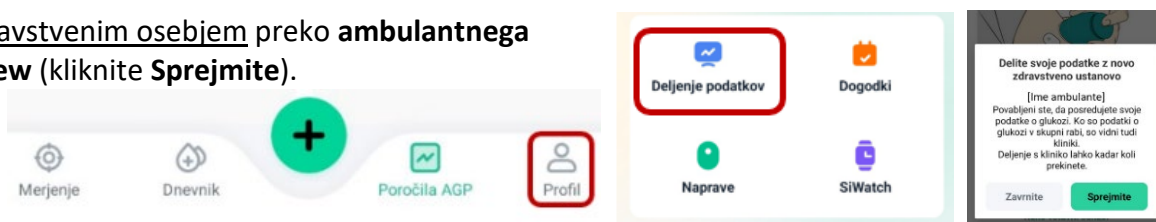

Podatke o meritvah pošljete na e-naslov:
kliknite **Poročila AGP** / kliknite **Poročilo** / kliknite **E-pošta** ali **Prenos**.

POMEMBNO – RAZLIKA MED SENZORSKO IN VREDNOSTJO MERILNIKA GLUKOZE V KRVI

Senzorski sistemi **ne merijo glukoze v krvi, ampak glukozo v tekočini med celicami** (v medceličnini). Glukoza ves čas počasi prehaja med krvjo in medceličnino in se uravna v približno **10-15 minutah**. Torej, kadar je sladkor stabilen, je vrednost glukoze v krvi zelo podobna vrednosti v medceličnini, kadar pa pada ali narašča (po jedi, po injiciranju insulina, ob telesni aktivnosti in ob stresu), boste opazili večje razlike.

Senzorsko vrednost in vrednost glukoze izmerjeno z merilnikom primerjajte z 10-15 minutnim zamikom.



Ob vbodu nastane na mestu vstavitve ranica in proces celjenja, ki traja od 12 do 48 ur, vpliva na izmerjene vrednosti. Zato so **izmerjenje vrednosti prvi dan ali dva lahko nekoliko nižje**.

Vsak senzor GS1 je zasnovan tako, da **deluje do 14 dni**. Po 14 dneh uporabe vas bo aplikacija SIBIONICS pozvala, da senzor zamenjate z novim.