



EAR BAND-IT® ULTRA

NAGLAVNI TRAK ZA PLOVANJE IZ NEOPRENA

Uporaba:

NAVODILA ZA UPORABO: Trak namestite okoli glave tik ob rob lasišča ali pod njim. Zapnite ga za vratom, da se udobno in tesno prilega. Za najboljše rezultate ga nosite pod lasmi. Upoštevajte, da je trak lahko ob prvem nameščanju nekoliko tesen. Če je tako, primite oba konca in večkrat močno povlecite, da se neopren raztegne.

VZDRŽEVANJE: Trak Ear Band-It® Ultra bo ostal čist, tudi če ga uporabljate v bazenih s klorirano vodo, v kadi ali pod prho. Če je potrebno pranje, ga ročno operite z blagim detergentom in posušite na zraku.

POMEMBNO! Za boljšo zaščito trak Ear Band-It® Ultra uporabljajte skupaj s čepki ali vložki za ušesa. Ni priporočljivo za skok na glavo v vodo.

Zakaj izbrati Ear Band-It® Ultra?

Ear Band-It® Ultra je zasnoval otorinolaringolog z več kot 40 leti izkušenj in ga zdravniki po svetu priporočajo za plavanje, prhanje in splošno zaščito pred vodo. Narejen je bil z namenom, da čepki ali vložki za ušesa ostanejo na mestu in preprečijo vdor vode v uho. Edinstvena zasnova **Ear Band-It® Ultra** nudi izjemno udobje in zaščito ušes.

Ear Band-It® Ultra je narejen iz posebej izdelanega neoprena, ki na notranji strani zagotavlja boljši oprijem na čelu, ušesih in zatilju ter preprečuje drsenje med večino vodnih aktivnosti.

Edinstvena zasnova Ear Band-It® Ultra se razlikuje od ostalih plavalnih trakov. Večja površina omogoča boljši oprijem po celotnem obsegu. Izdelan je iz 4,0 mm 100 % neoprena in ne iz 2,0 – 3,0 mm neoprena, kot pri drugih trakovih za ušesa. To daje **Ear Band-It® Ultra** večjo trpežnost in udobje.



PUTTY BUDDIES®


VISOKO KAKOVOSTNI MEHKI ČEPKI ZA UŠESA IZ SILIKONA

(če so čepki za ušesa priloženi pakiranju)

Navodila za uporabo

- Čepke naj vstavi odrasla oseba, nikoli otrok.
- Čepke oblikujte v kroglico in jo sploščite s prsti. Oblikujte, da pokrije zunanji del ušesa in se udobno prilaga.
- Čepke odstranite s pritiskom za ušesom.
- Čepki so za večkratno uporabo. Odvrzite jih 2 tedna po prvi uporabi (največ 5 uporab), če razpokajo, razpadejo ali se umažejo.
- NE trgajte čepkov ali jih silite v ušesni kanal. Glejte sliko.
- NE uporabljajte s plavalno kapo.
- NE uporabljajte med spanjem ali za zaščito pred hrupom.
- NE dovolite stika z lasmi, losjoni, sončnimi kremami ali kemikalijami. Čepke vedno nameščajte in odstranjujte s čistimi in suhimi rokami.

(Za podrobnejše informacije si oglejte navodila v embalaži.)

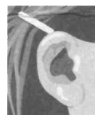

**PRIPOROČENA
UPORABA**



**NE VSTAVLJAJTE V
UŠESNI KANAL**

Za zamenjavo ušesnih čepkov obiščite **www.EarVolution.com**.

Mehke silikonske čepke za ušesa Putty Buddies® je zasnoval izkušen otorinolaringolog z več kot 40 leti izkušenj in ga zdravniki po svetu priporočajo za plavanje, prhanje in splošno zaščito pred vodo.

OPOZORILO: Potreben je nadzor odrasle osebe. Ni priporočljivo za potapljanje na globini nad 3 metre. Ni priporočljivo uporabljati s plavalno kapo. Ni priporočljivo za zaščito pred hrupom ali spanje. Izogibajte se stiku z lasmi, losjoni, sončnimi kremami ali kemikalijami. Nameščajte in odstranjujte s čistimi in suhimi rokami. Čepki za ušesa se nosijo SAMO v času, ko ste v vodi. Čepke shranjujte v nadzorovani sobni temperaturi, ko jih ne uporabljate. Za največjo zaščito čepke uporabljajte skupaj z Ear Band-It® ali Ear Band-It® Ultra naglavnim plavalnim trakom.

PREVODNO: Prekrijte le odprtino ušesa. NE VSTAVLJAJTE V UŠESNI KANAL. Silikonski čepki so varni, če upoštevate navodila. Če potisnete čepke v ušesni kanal, ga NE skušajte sami odstraniti. Ne uporabljajte pincete, vatiranih palčk ali drugih pripomočkov, saj lahko čepke potisnete še globlje v kanal. Čimprej poiščite pomoč zdravnika, ki ima ustrezne instrumente in znanje za varno odstranjevanje čepkov. Če je čepke v ušesnem kanalu krajši čas, ne bo povzročil škode, če ga ne boste poskušali sami odstraniti in ga nehoti potisnili globlje v odprtino. Uporabljajte samo kot je navedeno v navodilih.

POMEMBNO: Učinkovitost je največja, kadar se čepki in trak Ear Band-It® uporabljajo skupaj. Ni primerno za skakanje na glavo v vodo.

OPOZORILO:

NEVARNOST ZADUŠITVE – Majhni deli.

Uporabljajte se pod nadzorom odraslih.

Hranite izven dosega otrok, mlajših od 3 let.



Proizvajalec: EarVolution, Inc., Phoenix, AZ 85064, ZDA

Uvoznik: Zaloker & Zaloker d.o.o., Kajuhova ulica 9, 1000 Ljubljana

Leto uvoza: APRIL 2025