

ANTIMIKROBNE OBLOGE ZA RANE Z BAKROVIM OKSIDOM (AMWD) MEDCU

Opis

Antimikrobne obloge za rane z bakrovim oksidom MedCu (v nadaljevanju: AMWD) so Antimikrobne vpojne dvo- ali triplastne, sterilne, mehke, nelepljive obloge za rane za enkratno uporabo, ki so sestavljene iz:

- Notranja vpojni sloj iz celuloze in poliestra, ki vsebuje bakrov oksid.
- En ali dva zunanja neagresivni netkana polipropilenski sloja, ki vsebujeta bakrov oksid

En ali dva zunanja sloja, ki ustrezno prekrivata notranji sloj z ene ali obeh strani. AMWD je na voljo v več velikostih, na primer 10 cm × 10 cm ali 5 cm × 5 cm. Na voljo so lahko tudi druge velikosti. Točne mere so navedene v oznakah posameznih pripomočkov. Obloga za rane je lahko z ali brez lepljivega roba. Obloga za rane je sterilizirana po postopku sterilizacije ETO. Sterilnost se ohrani, dokler ovoja ne odprete ali pretrgate. Obloge MedCu vpijajo izločke iz rane, ščitijo pred kontaminacijo obloge in služijo kot pregrada pred zunanjo kontaminacijo, kar zmanjšuje tveganje za kontaminacijo rane.

Indikacije

Antimikrobne obloge za rane MedCu z bakrovim oksidom so indicirane za oskrbo ran in zagotavljanje antimikrobne pregrade. Obloge se uporabljajo lokalno in so v neposrednem stiku z rano. Obloge so namenjene za naslednje indikacije:

- **Indikacije za uporabo brez recepta (OTC):**
- Lokalna oskrba površinskih ran, manjših prask, odrgnin in raztrganin (laceracij).
- **Indikacije za predpisovanje (samo na recept):**

Rane z delno ali popolno izgubo mehkega tkiva, razjede zaradi pritiska (I. do IV. stopnje), diabetične razjede, venske razjede, arterijske razjede, opekline 1. in 2. stopnje, kirurške rane, mesta žilnega dostopa ali periferne infuzije, mesta ortopedskih zunanjih zatičev in akutne rane, kot so laceracije, odrgnine in raztrganine kože.

Kontraindikacije

Ne uporabljajte pri bolnikih, ki so preobčutljivi na baker.

Za uporabo samo na recept

Priprava dna rane:

- Pred namestitvijo obloge, v skladu s protokolom ustanove temeljito očistite in osušite okolico rane.
- Po potrebi pred namestitvijo obloge odstranite nekrotično tkivo.
- Rane z malo ali nič izločka navlažite v skladu s protokolom ustanove.
- Po potrebi zdravite okužbo v skladu s protokolom ustanove¹.

Za zdravljenje brez recepta in zdravljenje na recept:

Namestitev obloge:

- Izberite oblogo ustrezne velikosti, z zgornje strani odprite sterilni ovoj in aseptično

vzemite oblogo za rane.

- Če uporabljate trislojne obloge za rane (MedCu-3) (oranžne na obeh straneh), namestite oblogo na rano s katere koli strani. Pokrijte s sekundarno¹ oblogo in pritrdite s trakom za pritrdjevanje ali povojem.
- Če uporabljate dvoslojne obloge za rane MedCu (z eno stranjo oranžne barve), na mesto rane namestite oranžno stran obloge. Pokrijte s sekundarno¹ oblogo in pritrdite s trakom za pritrdjevanje ali povojem.
- Če uporabljate obloge za rane MedCu z lepljivim robom, dodatna pritrditev s trakom ali povojem ni potrebna.
- Zdravnik mora oceniti vsako rano in bolnika, da določi najboljši način pritrditve oblog MedCu.
- Zdravnik lahko v skladu s protokoli ustanove izbere katero koli metodo pritrditve.

Pogostost menjave obloge:

- Pogostost menjave oblog se lahko razlikuje glede na stanje rane in presojo zdravnika.
- Obloge MedCu AMWD lahko ostanejo na mestu do 7 dni.

Menjava in odstranitev obloge:

- Obloge MedCu AMWD je treba zamenjati, ko so opazni znaki prepojenosti obloge ali kadar koli to narekuje praksa zdravnika in protokol ustanove.
- Če želite zamenjati nelepljive obloge MedCu, odstranite pritrdilne trakove ali povoje in previdno dvignite oblogo z rane. Za lažje odstranjevanje obloge z rane le-to po potrebi navlažite s sterilno fiziološko raztopino.
- Če želite zamenjati lepljive obloge MedCu, previdno odlepите lepljiv rob in oblogo nežno odstranite z rane.

Previdnostni ukrepi

- Samo za enkratno uporabo • Ne sterilizirajte ponovno • Samo za zunanjo uporabo
- Hraniti pri sobni temperaturi • Sterilnost se ohrani, dokler sterilen ovoj ni pretrgan.
- Ne uporabljajte, če je ovojnina odprta ali poškodovana. MedCu AMWD se lahko uporablja na okuženih ranah, ki se zdravijo v skladu s kliničnimi protokoli ustanove za zmanjševanje okužb, kot dodatek k standardnemu načinu zdravljenja. • Uporaba brez recepta je dovoljena le za površinske rane, manjše opekline, odrgnine in raztrganine. Za druge vrste ran je predpisana samo na recept.

Razlaga simbolov

Simbole na ovojnini izdelka je treba razlagati na naslednji način:



Rok uporabe



Samo za enkratno uporabo



Glejte navodila za uporabo



Ne sterilizirajte ponovno



Če je embalaža poškodovana,
pripomočka ne uporabite,
glejte navodila za uporabo



Datum proizvodnje



Sterilizirano z etilenoksidom



Proizvajalec



Hranite na suhem



Koda serije



Oznaka CE



Kataloška številka

Če so potrebne dodatne informacije, se obrnite na:



MedCu Technologies Ltd .
Hasadnaot 10, Herzliya
4672837, Israel.
info@MedCu.com
www.MedCu.com



MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10,
48163 Muensler,
Germany