

Obloga za prst PolyMem®

REF 4401 #1 obloga za prst
 REF 4402 #2 obloga za prst
 REF 4403 #3 obloga za prst
 REF 4404 #4 obloga za prst
 REF 4405 #5 obloga za prst

REF 1401 #1 obloga za prst, s srebrom
 REF 1402 #2 obloga za prst, s srebrom
 REF 1403 #3 obloga za prst, s srebrom
 REF 1404 #4 obloga za prst, s srebrom
 REF 1405 #5 obloga za prst, s srebrom



FERRIS MFG. CORP.

5133 NortheastParkway, Fort Worth,
 TX76106-1822, ZDA

Brezplačni tel. v ZDA: 800 765 9636,
 Int. +1 817 900 1301, www.polymem.com,
 info@polymem.com

Emergo Asia Pacific Pty Ltd, 201 Sussex Street,
 Darling Park, Tower II, Level 20 Sydney, NSW
 2000 Australia



Emergo Europe Molenstraat 15,
 2513 BH Haag, Nizozemska



Ne uporabljajte ponovno. Ponovna uporaba lahko povzroči kontaminacijo.



Sterilno, če ovojnina ni odprta ali poškodovana.




Obloga in embalaža ne vsebujeta lateksa.




FMC-5895,R1 0118

Obloga PolyMem je izdelana iz hidrofilne polimerne membrane, ki vsebuje (1) varno čistilno sredstvo, (2) vlažilno sredstvo-glicerol in (3) vpojno sredstvo. Prekriva jo tanek polprepustni film, ki preprečuje kontaminacijo in prepušča kisik in vodne hlapce. Oblogo PolyMem lahko uporabite kot kombinacijo primarne in sekundarne obloge ali kot sekundarno oblogo. Visoko prilagodljiva obloga z vlekom tekočine zbira v rani naravne rastne faktorje in hranila.


NAMEŠČANJE: Enostavna namestitvev – oblogo samo odvijete na prst.

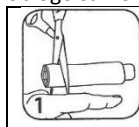


Izmerite potrebno dolžino obloge, tako da jo pomerite ob prst in odrežete odvečen spodnji del.

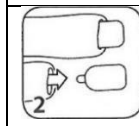


Izvalcite vstavek in ga zavrzite.

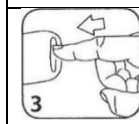

Prst vstavite v odprtino.

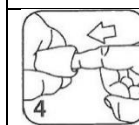

Prst potisnite v odprtino in odvihnite privihnen del.

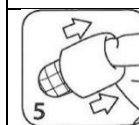


Oblogo popolnoma odvihnite vzdolž prsta



Obloga se mora udobno prilegati prstu. Ne sme biti pretesna ali preohlapna.

Pozor: potiskana stran mora biti na zunanji strani

Če je obloga pretesna, jo odstranite in uporabite večjo. Odstranite jo tako, da jo zavihnate, v obratni smeri kot ob namestitvi. Več načinov namestitve: Za nožne prste lahko del obloge ob strani prerežete, da dobite 2 trakova, ki ju namestite na zg. in sp. del stopala in pričvrstite s trakom. Oblogo lahko tudi odrežete, da dobite obroč, ki ga namestite na poškodovan prst

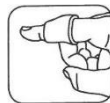

Obloge PolyMem Silver vsebujejo majhne delce srebra (124 µg/cm²; 2.000 delcev/milijon). Srebro ščiti obloge pred kontaminacijo z mikrobi. Obloge PolyMem Silver ne puščajo madežev na koži.

Obloge PolyMem brez zdravil pomagajo:

- zmanjšati in omiliti občutek bolečine v rani in bolečine zaradi oskrbe rane
- zmanjšati oteklino, modrico in omejiti širjenje vnetja v okolno nepoškodovano tkiva

INDIKACIJE: za oskrbo večine površinskih in globokih ran, vključno z

- razjedami zaradi pritiska (stopnje I-IV)
- akutne in kirurške rane
- raztrganine kože
- dermatološke spremembe
- odvzemna in prejemna mesta pri presaditvah
- diabetične in vaskularne razjede,
- opekline 1. in 2. stopnje

KONTRAINDIKACIJE: niso znane

VARNOSTNI UKREPI • Le za zunanjo uporabo • Obloge PolyMem niso kompatibilne z oksidirajočimi substancami (vodikov peroksid, raztopine hipoklorita) • Ne sterilizirajte ponovno. • Ne uporabljajte, če je ovojnina poškodovana ali odprta. • Le za enkratno uporabo. • Pred postopki slikanja v medicini preverite ali je potrebno oblogo odstraniti

- Izogibajte se kontaktu z elektrodami ali prevodnimi geli
- Med uporabo obloge PolyMem ni priporočljivo sočasno lokalno zdravljenje rane
- Bodite pozorni na znake infekcije ali maceracije.

Obloge PolyMem so primerne za uporabo ob prisotnih znakih okužbe, če je že uvedeno ustrezno zdravljenje okužbe.

Uporaba oblog PolyMem Silver je priporočljiva, kadar se rana celi počasneje, so prisotni znaki okužbe, je povišana mikrobna obremenitev, ali pa ima bolnik faktorje tveganja okužbe (kontaminirana rana, slaba prehranjenost, sladkorna bolezen, zgodovina okužb in podobno).

Shranjevanje: Na suhem mestu, pri sobni temperaturi in vlažnosti.

Rok uporabnosti: 3 leta od datuma izdelave (označen na embalaži).

Dimenzije: Dimenzije in mere označene na embalaži so približne.

Prva namestitvev:

1. Pripravite poškodovano mesto po protokolu oz. po navodilu zdravnika. Očistite kožo nečistoč in lokalno nanešenih pripravkov. Ostanek vlage na koži je koristen.
2. Namestite oblogo kot je prikazano. Obloga naj prekriva tudi vnete oz. poškodovane predele okoli poškodbe. Oblogo lahko režete, da jo prilagodite poškodbi oz. mestu uporabe.
3. Potiskana stran obloge mora biti zgoraj (vidna).

NAMIG:

1. *Da se obloga ne zmoči z notranje strani, jo pričvrstite z nepremočljivim zaščitnim trakom.*
2. *Na zgornji strani obloge zarišite približen obris rane za pomoč pri odločitvi, kdaj zamenjati oblogo.*

Prva uporaba:

1. V prvih dneh oskrbe je možno povečano izločanje iz rane; to ni neobičajno in pomeni, da obloga deluje.
2. Obloga naj bo suha in na svojem mestu tudi med kopanjem oz. umivanjem rok. Če se zmoči, jo zamenjajte.

Menjava:

1. Pri ranah, ki izločajo, postane izločena tekočina vidna skozi oblogo. Oblogo zamenjajte preden tekočina doseže robove ran oz. kot priporoča dobra klinična praksa ali najkasneje po 7 dneh. Če se obloga prepoji, jo zamenjajte takoj.
2. Pogostejše menjave bodo morda potrebne pri oslabiljenem imunskem sistemu, sladkorni bolezni, okužbi rane, oziroma kadar želimo pospešiti odstranjevanje mrtvin..
3. Oblogo odstranite nežno. Obloga PolyMem se z rano običajno ne sprime, zato odstranjevanje navadno ne povzroča bolečin. Preglejte oblogo in rano, da se prepričate, da je odstranjen ves material.
4. **NE POSEGAJTE V RANO. NE ČISTITE JE** in ne izpirajte s fiziološko raztopino ali vodo, razen v primeru okužbe ali kontaminacije rane. Obloga PolyMem rano neprekinjeno čisti in v njej ne pušča ostankov. Dodatno čiščenje lahko poškoduje novonastalo tkivo in podaljša čas zdravljenja. Če se obloga zaradi posušenega izločka trdno drži nepoškodovane kože, z majhno količino fiziološke raztopine ali vode sprimek počasi in nežno zmehčajte in odstranite. Očistite nepoškodovano kožo okoli rane in ne posegajte v posteljico rane.
5. Namestite novo oblogo.

Opazovanje med uporabo in menjavo

• Med normalnim procesom celjenja lahko rana med prvimi menjavami postaja večja, kajti telo po naravni poti odstranjuje odmrlo tkivo. Če pa se rana še naprej veča, se posvetujte z zdravnikom. • Bodite pozorni na znake okužbe ali maceracije tkiva (npr. rana močnejše boli, je bolj vroča, pojav večje rdečine, draženje, neobičajno smrdi ali okolica rane postaja bleda in bolj občutljiva). • Obloge PolyMem pomagajo pri nastanku novih krvnih žilic, zato krvavo obarvan izloček iz rane in v oblogi med menjavami ni neobičajen.